




WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA PREPARATU DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI

1

< 30°C

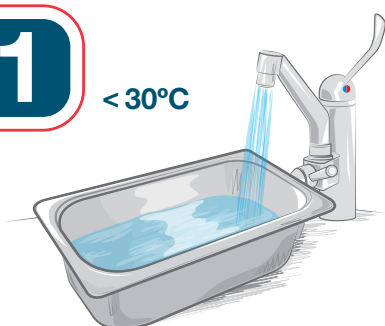

W zależności od pojemności **napęlnić wanienkę do dezynfekcji** narzędzi odpowiednią, odmierzoną ilością zimnej wody.

2



W celu uzyskania stężenia 1% lub 2% należy odmierzyć na 1 l roztworu:

- 10 g preparatu (15 ml) - roztwór 1%
 - 20 g preparatu (30 ml) - roztwór 2%
- Odmierzoną ilość preparatu wsypać do wody.

3



15 min



Powstały roztwór **kilakrotnie zamieszać**. Roztwór jest gotowy do użycia po upływie 15 minut.

4



Włożyć narzędzia do roztworu. Zwrócić uwagę, aby przedmioty były całkowicie zanurzone i wypełnione roztworem.

Czas działania: patrz wyniki badań mikrobiologicznych na etykiecie lub ulotce do preparatu.

5



Po zakończeniu procesu dezynfekcji **narzędzia wyjąć, wypłukać i wysuszyć**. Przed użyciem poddać właściwym procesom sterylizacji.

Roztwór dezynfekcyjny należy zmieniać codziennie. Przy widocznym zabrudzeniu substancjami organicznymi zalecane jest przygotowanie świeżego roztworu. Aktywność roztworu dezynfekcyjnego można kontrolować przy pomocy pasków kontrolnych.

6



Sposób użycia pasków testowych:

- zanurzyć w roztworze obszar testowy paska na ok. 2 sek.
- strząsnąć nadmiar roztworu z paska
- po upływie 30 sek. odczytać wynik porównując z załączonym wzorem barwnym

Interpretacja odczytu:

Porównać obszar testowy (odpowiednio do stężenia) kolor identyczny lub intensywniejszy = pełna aktywność, kolor jaśniejszy bądź mniej intensywny = wymienić roztwór.

■ Stężenie 1% - czas dezynfekcji 1 h

■ Stężenie 2% - czas dezynfekcji 15 min.

Dozowanie preparatu Sekusept Aktiv za pomocą załączonej miarki

Stężenie	Ilość roztworu					
	2 l	4 l	8 l	10 l	20 l	30 l
1,0 %	30 ml	60 ml	120 ml	150 ml	300 ml	450 ml
2,0 %	60 ml	120 ml	240 ml	300 ml	600 ml	900 ml

1 miarka = 20 g (30 ml)