

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Elektroniczny pas rozgrzewający na bóle menstruacyjne HUAYU HY-V7



Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. W ten sposób unikniesz niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

SRODKI OSTROZNOSCI

Wszystkie wytyczne zawarte w instrukcji odnoszą się do bezpieczeństwa użytkowania urządzenia i należy postępować zgodnie z tymi wytycznymi.

1. Nie używaj innych niż dostarczone z produktem akcesoria. Użycie nieautoryzowanych akcesoriów może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Uszkodzenie urządzenia powstałe w wyniku zastosowania nieautoryzowanych akcesoriów nie podlega gwarancji.
2. Po otwarciu opakowania z urządzeniem upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i że opakowanie zawiera wszystkie niezbędne akcesoria.
3. Dzieci oraz osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej/opiekuna.

 Zakaz	Działania opatrzone znakiem zakazu są kategorięcznie zabronione. Działania takie mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
 Ostrzeżenie	Działania oznaczone znakiem ostrzeżenia muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji, w przeciwnym razie działania te mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
 Uwaga	Działania oznaczone znakiem uwagi wymagają od użytkownika ostrożności, w przeciwnym razie działania te mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

**Zakaz**

1. Zabrania się korzystania z urządzenia następującym osobom: osoby z zapaleniem skóry, uszkodzoną skórą w okolicy podbrzusza, osoby po operacjach w obszarze podbrzusza, osoby z gorączką, dzieci poniżej 14 roku życia nie będące pod nadzorem osoby dorosłej, osoby z zaburzeniami odczuwania ciepła, osoby z zaburzeniami percepcji wynikającymi z ciężkiego zaburzenia krążenia obwodowego, np. w przebiegu cukrzycy, osoby chore.

**Ostrzeżenie**

1. Zabrania się polewania wody lub innych cieczy na elementy grzewcze urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do spięcia i innych wypadków.
2. Pamiętaj, żeby wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem do jego czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i obrażeń ciała.
3. Używaj dołączonego do zestawu kabla USB do ładowania urządzenia.
4. To urządzenie jest urządzeniem przeznaczonym do użytku osobistego, nie jest to urządzenie medyczne i nie może służyć do diagnozowania, leczenia i innych komercyjnych zastosowań.

**Uwaga**

1. Urządzenie to nie powinno być stosowane przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, ograniczeniami sensorycznymi lub neurologicznymi lub brakiem doświadczenia i zdrowego rozsądku (w tym dzieci).
2. Nie używaj ostrych przedmiotów w celu przebicia materiału urządzenia.
3. Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas użytkowania urządzenia lub pojawi się wysypka, zaczerwienienie na ciele w miejscu korzystania z urządzenia, natychmiast zaprzestań korzystania z niego i skonsultuj się z lekarzem.
4. Jeśli wygląd urządzenia wskazuje na jego uszkodzenie, zaprzestań korzystania z niego.
5. Jeśli urządzenie podczas użytkowania zachowuje się w sposób odbiegający od zamierzonego, natychmiast zaprzestań korzystania z niego i wyłącz je.
6. Jeśli podczas korzystania z urządzenia wyczujesz zapach spalenizny lub urządzenie będzie wydawać z siebie niestandardowy dźwięk, natychmiast zaprzestań korzystania z niego i wyłącz je.
7. Jeśli nie korzystałeś z urządzenia przez dłuższy czas, zapoznaj się ponownie z instrukcją użytkowania i upewnij się, że urządzenie działa prawidłowo przed ponownym użyciem.

PARAMETRY URZĄDZENIA

Marka: HUAYU

Nazwa produktu: Elektroniczny pas rozgrzewający na bóle menstruacyjne

Model: HY-V7

Materiał: 76% nylon, 24% elastan

Wypełnienie: 100% gąbka poliuretanowa

Wymiary: 100 x 14,5 cm

Napięcie wejściowe: 5 V 2,1 A

Napięcie wyjściowe: 5 V 2,0 A

Moc: 9,2 W

Akumulator: Bateria polimerowo-litowa

Pojemność akumulatora: 2200 mAh (9,2 Wh/3,85 V)

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

- 1 x Elektroniczny pas rozgrzewający
- 1 x Kabel USB-C
- 1 x Zasilacz TD01
- 1 x Instrukcja użytkowania

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA



1. Umieść przód urządzenia na podbrzuszu.



2. Zapnij pas za pomocą magnetycznego zamknięcia.



3. Umieść zasilacz TD01 na pasie, w miejscu magnetycznych pinów.



4. Aby odpiąć zasilacz TD01 od pasa, delikatnie przekręć go o 90° zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

• Ładowanie urządzenia


Podcpnij kabel USB-C do zasilacza TD01 aby rozpocząć ładowanie. Podczas ładowania kontrolka zamieszczona na zasilaczu miga czerwonym światłem.

Kiedy urządzenie zostanie w pełni naładowane, kontrolka zaświeci zielonym światłem.

- Instrukcja ładowania

1. Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed pierwszym użyciem.
2. Parametry dołączonego do zestawu kabla USB-C to DC 5 V, 2 A. Do ładowania urządzenia używaj dostarczonego w zestawie kabla USB-C.
3. Jeśli zasilacz urządzenia będzie pozostawał rozładowany przez dłuższy czas, skróci to jego żywotność. Zaleca się pełne naładowanie zasilacza przynajmniej raz w miesiącu.

- Panel sterowania urządzeniem

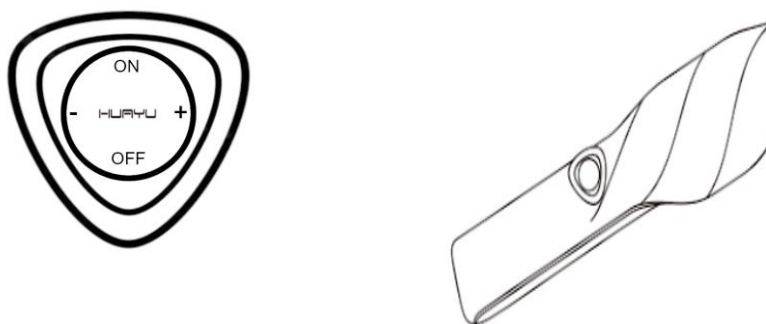

Zasilacz TD01 jest jednocześnie panelem sterowania urządzeniem. Na panelu sterowania znajdują się cztery przyciski:

- ON włączenie urządzenia
- OFF wyłączenie urządzenia
- + zwiększenie temperatury ogrzewania
- zmniejszenie temperatury ogrzewania

1. Po poprawnym wpięciu zasilacza w pas, zasilacz zawibruje przez sekundę, sygnalizując włączenie urządzenia.
2. Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk **ON** przez 1 sekundę. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk **OFF** przez 1 sekundę. Wciśnij przycisk **+** aby przełączyć urządzenie na tryb wyższej temperatury grzania i wciśnij przycisk **-**, aby przełączyć urządzenie na tryb niższej temperatury grzania.
3. Urządzenie wyposażone jest w trzy tryby grzania:
 - Tryb 1 - temperatura 45°C, zielona kontrolka;
 - Tryb 2 - temperatura 50°C, pomarańczowa kontrolka;
 - Tryb 3 - temperatura 55°C, czerwona kontrolka.
4. Po włączeniu urządzenia kontrolki wszystkich trzech trybów grzania są zawsze aktywne. Białe podświetlenie panelu sterowania także jest zawsze aktywne podczas gdy urządzenie jest włączone.
5. Zasilacz nie włączy się podczas ładowania. Zasilacz nie wpięty w pas można włączyć, ale nie rozpocznie on grzania aż do momentu wpięcia

- go w pas.
6. Jeśli, po włączeniu urządzenia, urządzenie wykryje, że zasilacz nie jest prawidłowo wpięty, zasilacz będzie nieustannie wibrował. Popraw wpięcie zasilacza w pas, a wibracje ustaną.
7. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 20 minutach grzania.

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

• Przechowywanie

Warunki przechowywania: temperatura otoczenia -10 do 50°C, wilgotność otoczenia 40-90%.

Jeśli urządzenie będzie przechowywane bez użytkowania przez okres minimum 3 miesięcy, przed ponownym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone i w pełni je naładuj. Przechowuj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słońca i żrących gazów.

• Przenoszenie i podróżowanie

Urządzenie zostało wyposażone w prosty mechanizm antywstrząsowy, dzięki któremu z urządzeniem można podróżować pociągami, samolotem, samochodem oraz statkiem. Podczas podróżowania z urządzeniem chroń je przed deszczem, nagłymi zmianami temperatury i uderzeniami.

• Kontrola stanu zasilacza

Sprawdź zasilanie. Jeśli napięcie zasilania przekracza określony dla urządzenia zakres, nie włączaj urządzenia. Często sprawdzaj zasilacz i kabel USB. Jeśli zauważysz jakieś uszkodzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania urządzenia.

• Czyszczenie

Wyłącz urządzenie przed przystąpieniem do jego czyszczenia.

1. Używaj profesjonalnych środków czyszczących do czyszczenia pasa, zwłaszcza jego wewnętrznej, grzejącej strony. Nie używaj pasa, kiedy jest wilgotny. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
2. Pas może być czyszczony z użyciem niewielkiej ilości wody, np. za pomocą zwilżonej ściereczki. Nie pierz pasa, nie zanurzaj i nie polewaj go wodą. Nigdy nie czyść zasilacza przy użyciu wody.
3. Delikatnie przetrzyj powierzchnię pasa ściereczką, nie używaj nadmiernej siły.
4. Nie używaj środków chemicznych takich jak rozpuszczalniki, benzyna, alkohol itp. do czyszczenia urządzenia.

PROBLEMY, MOŻLIWE PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
---------	-------------------	-------------

Urządzenie nie działa, nie włącza się	Bateria jest rozładowana	Naładuj urządzenie
Urządzenie nagle przestało działać	Bateria jest rozładowana	Naładuj urządzenie
Urządzenie nie emituje ciepła	Jeśli temperatura otoczenia jest niska, np. w zimie, urządzenie może potrzebować więcej czasu, żeby się w pełni nagrząć	Odczekaj chwilę, aż urządzenie zacznie grzać