

Prezerwatywy PASANTE TRIM 72 szt Super Dopasowane Sex Antykoncepcja dla Par

PASANTE TRIM 72 sztuki to ściśle przylegające kondomy, które intensyfikują poczucie bliskości między partnerami.

- ✔ Charakteryzują się mniejszą średnicą i krótszą długością w porównaniu do standardowych prezerwatyw, co sprawia, że są one doskonale dla tych, którzy pragną większej bliskości.
- ✔ Anatomiczny kształt ułatwia wygodne zakładanie. Dodatkowo nasączone środkiem nawilżającym.
- ✔ Nadają się do stosowania zarówno podczas stosunku waginalnego, jak i analnego. Idealne dla osób, które pragną maksymalnej bliskości między sobą.

★ UWAGA

Przedmiotem aukcji jest oryginalnie zapakowana paczka 72 sztuk Pasante TRIM widoczna na zdjęciu.

★ SPECYFIKACJA

- ▶ Długość: 180 mm
- ▶ Szerokość: 49 mm
- ▶ Grubość: 65 mikronów
- ▶ Materiał: Naturalna guma lateksowa
- ▶ Struktura: Prezerwatywy gładkie
- ▶ Kształt: Easy-On, łatwe do nałożenia
- ▶ Kolor: Przeźroczyste

★ Prezerwatywy posiadają instrukcje w języku polskim (dodatkowo dołączona do aukcji w formie PDF)

1. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z prezerwatywą, aby uniknąć niezamierzonego uszkodzenia. Przed użyciem sprawdź datę ważności.
2. Ściśnij końcówkę, aby usunąć powietrze i zostawić wystarczająco dużo miejsca na złapanie nasienia. Następnie umieść prezerwatywę na penisie we wzwodzie.
3. Rozwiń prezerwatywę do podstawy członka. Sprawdź, czy czujesz się komfortowo - prezerwatywy, które są zbyt luźne lub zbyt ciasne, mogą prowadzić do pęknięcia.
4. Usuń prezerwatywę zaraz po wytrysku. Wyrzuć zużytą prezerwatywę do kosza na śmieci. Nie splukuj w toalecie.

Prezerwatywy posiadają certyfikat jakości CE oraz ISO.

Każda sztuka jest sprawdzana oraz testowana pod kątem jakości.

Data ważności: 1-4 lata.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Producent: Pasante Ltd. (UK) , Upoważniony przedstawiciel: Advena Ltd. (MT), Podmiot prowadzący reklamę: Pasante Europe Ltd. (IE)