



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Typ:LI

LINKI REHABILITACYJNE



Linki rehabilitacyjne do ćwiczeń i rehabilitacji wspomagająca ruch w stawach do samodzielnego montażu i ćwiczenia w domu.

Producent Podwieszki.pl Jarosław Fedczak Kruszwiec 4a, 11-400 Kętrzyn www.podwieszki.pl		Typ: LI
Nr seryjny: LI/2023	Rok prod: 2023r	
Skład: - Rączki drewniane - Taśma 100% Polipropylen - Linka 100% Polipropylen	   Made in Poland	

Przeznaczenie

Linki rehabilitacyjne z bloczkiem przeznaczona jest do ćwiczeń samo wspomagających ruch kończyn górnych tułowia, opór dla jednej kończyny stanowi ciężar drugiej kończyny górnej.

Produktu należy używać dopiero po konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.

W celu ustalenia wskazań i przeciwwskazań do ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem lub rehabilitantem.

Wskazania

Przeciwdziałanie zanikom mięśni, przyrost siły mięśni, zapobieganie przykurczom w stawie, zwiększenie zakresu ruchów w stawach, zmiany zwyrodnieniowe stawów, stan po unieruchomieniu, po udarach.

Przeciwwskazania

Ostre stany zapalne stawów, stany zapalne tkanek okołostawowych, stany zapalne żył, wysoka gorączka i złe samopoczucie, złamania, stany pourazowe, po złamaniach kości z niepełnym zrostem, stany po zwłknięciu, przerwanie ciągłości skóry bezpośrednio po zabiegach operacyjnych oraz ból występujący podczas ćwiczeń, ostry zespół wieńcowy, ostra zakrzepica, ciąża, zapalenie mięśnia sercowego.

Uwaga!

- Wyrób zaprojektowany do używania wyłącznie przez jedną osobę.
- Zabrania się owijania części przyrządu wokół szyi grozi uduszeniem.
- Zabrania się wykorzystywania podwieszek do innych celów niż ich przeznaczenie, nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie.

Gwarancja: 12 miesięcy



KARTA GWARANCYJNA

Nazwa sprzętu: **LINKI**

Model: **LINKI REHABILITACYJNE**

Typ: **LI**

Data sprzedaży:

Faktura nr

Paragon nr

Dane kontaktowe do klienta

Opis usterki

Producent udziela pisemnej gwarancji na urządzenie i podzespoły na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja ważna wraz z dowodem zakupu.

Producent
 PODWIESZKI.PL Jarosław Fedczak
 Kruszwiec 4a, 11-400 Kętrzyn
 Email- sklep@podwieszki.pl
 tel: 602-495-164


SPOSÓB MONTAŻU Typ:LI

Wyłącznie do sufitów –stropów betonowych i żelbetonowych, w przypadku innych sufitów montaż po konsultacji z osobą z uprawnieniami budowlanymi. Zaznaczyć na suficie miejsce zamontowania kołka rozporowego, za pomocą wiertarki i wiertła f12 wywiercić otwór, wbić całkowicie w strop kołek rozporowy i wkręcić maksymalnie haczyk.

Podczepianie linek:

Na zamontowane kołki z haczykiem) założyć bloczki, aby upewnić się że kołek z haczykiem został prawidłowo zamontowany przeprowadź test wytrzymałościowy; naciągnij linki maksymalną siłą wykorzystując ciężar ciała. Jeśli kołki sufitowe wraz z haczykami trzymają się stabilnie – przyrząd jest gotowy do zamontowania. Zaczepić linki za pomocą bloczków na hakach sufitowych sprzęt gotowy jest do ćwiczeń.

W celu wyregulowania długości linki można stosować dwie metody opisane graficznie poniżej.

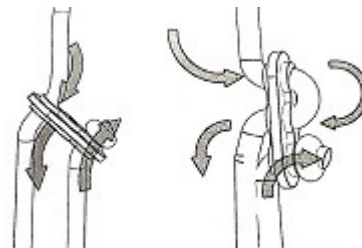

Długość linki można regulować za pomocą regulatorów długości w taki sposób, aby część z regulatora za każdym razem była prawidłowo zablokowana jak na rysunkach.