



ENEHUB 智能健康空間 — 官方詳細使用者指南



AI 自我健康檢測



高度私密與安全



簡單易用



! 操作須知及注意事項

【自動艙門提示】：本艙門採用全自動智能感應系統。系統解鎖及體驗結束時，艙門均會自動打開或關閉，全程無需、亦請勿使用人手強力推拉門柄，以免損壞感應組件。


【高度私隱防護】：體驗開始後，智能自動調光玻璃將會自動霧化。搭配最高 50 分貝的專業隔音結構，從外部無法看見、聽到艙內狀況，全面守護個人私隱。

❤ 智能解鎖，身心煥新：EneHUB 輕鬆使用流程

1

預約時段

請先提早預約登記

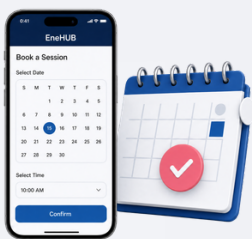

請先透過預約系統，登記15分鐘專屬體驗時段。

2

掃碼進門



系統成功解鎖後，艙門會自動打開，毋須手動推拉。入座後艙門將自動關閉。

3

選擇您的智能 體驗模式



當您安坐後，系統將啟動「人工智能引導操作」，伴隨歡迎提示音，引導您在螢幕選取其中一種體驗模式


4

自動離艙



15 分鐘預約體驗結束後，艙門將會自動打開。請於座位上耐心稍候，無需自行手動開門。離開前請記得帶齊您的隨身物品。

選擇您的智能體驗模式

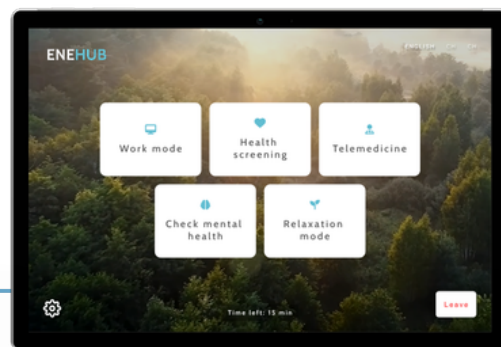

模式A

健康自助檢查模式

日常專屬健康管理方案，透過醫療級檢測設備互動介面，一站式掌握個人健康狀況。

操作指引

跟隨屏幕上AI語音導航的簡單語音引導，使用以下設備



基礎健康指標：
體溫計, 血壓計, 血氧計



心臟健康功能：
ECG 心電圖儀檢測、心率變異分析 (HRV)



身體組成功能：
測量身高與體重，系統將自動計算 BMI 指數



體溫計



血壓計




血氧計



ECG 心電圖儀



體重儀

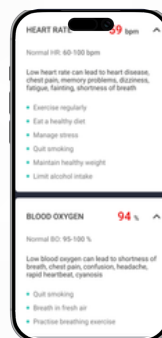

模式B

心靈健康與放鬆心情模式

專門舒緩生活、工作及學業帶來的壓力，透過3D沉浸式體驗，迅速為身心充電。

操作指引

透過AI語音引導提問，系統會根據您的「壓力指數」分析結果，自動推薦最適合您的解壓方案：



視覺與聲音療癒




語音引導冥想




人工智能樹洞



互動舒壓遊戲

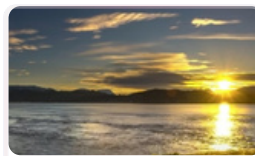

視覺與聲音療癒

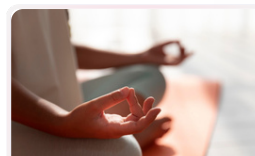

語音引導冥想



舒壓遊戲




人工智能樹洞

體驗結束前，系統會生成「心理分數卡」，清楚掌握自身專注、放鬆與壓力三大狀況指標。

Stress Score: 5

Normal Elevated High
You have elevated stress

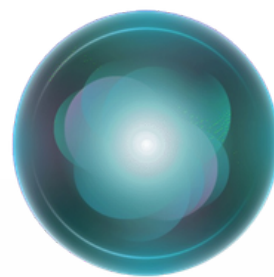

選擇您的智能體驗模式

模式C

診症及藥物治療模式 / 遙距醫療

可對接外部醫療系統（如 ClinicONE），為用戶提供即時的专业醫生遠距問診服務。

操作指引

1



點選模式

2



即時上傳檢測數據

用戶可利用艙內的醫療級檢測設備

3



連接醫生，視像問診

即時將數據傳送給醫生輔助診斷

4



完成問診，安排配送

結束問診後，合作認證醫療網絡可安排處方藥物物流配送。



醫療數據全程加密，嚴格保障你的私隱與安全

模式D

高效智能工作模式

適合需臨時安靜空間開展商務會議、辦公及專注工作之人士使用。

操作指引

1



進入工作模式

2



連接裝置

用戶可將手提電腦或其他流動裝置，連接至艙內的大型顯示螢幕

3



會議/展示

進行 Zoom 視訊會議、文件展示及高效辦公。

4



充電

艙內亦備有多種充電裝置，保持設備電量充足。



隔音降噪

高達 50 分貝

