

KIT CIRÚRGICO JOELHO / OMBRO / QUADRIL ORTOPEDIA GERAL ESTÉRIL POLAR FIX

Modelo comercial: com variações entre largura e comprimento.

Indicação de uso: Garantir a devida proteção do paciente e do profissional da saúde, minimizando transferências cruzadas de agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos. Combina conforto, maleabilidade e alta resistência ao rasgo e fricção.

Instrução de uso:

- 1- Cobertura de Mesa de Instrumentos: Posicionar no centro da mesa e abrir no sentido da largura da mesa (direita/esquerda);
- 2 - Campo cirúrgico para joelho / ombro / quadril / ortopedia geral: Posicionar o campo no local desejado e abrir sobre o paciente conforme orientação de abertura.
- 3 – Campo impermeável em U: Posicionar na região a ser operada para degermação (aproximação)
- 4 – Bota impermeável: Posicionar a bota no pé e puxá-la para isolar a área.
- 5 – Fitas adesivas: Posicionar no local desejado para fixação.
- 6 – Bolsa: Aderir no local desejado.

Composição: Cobertura de mesa de instrumentos: confeccionada em filme de polietileno + reforço absorvente de viscose. Campo cirúrgico para Joelho, Ombro, Quadril e/ou Ortopedia Geral: confeccionados em SMS (100% polipropileno) com fenestra redonda, oval ou em U. Campo impermeável em U: confeccionado em polietileno, com fita adesiva hipoalergênica. Bota impermeável: confeccionada em filme de polietileno. Fitas adesivas: Fita adesiva hipoalergênica. Bolsa: confeccionada em Polietileno.

Advertências / Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. **Produto esterilizado por óxido de etileno.**

Condições de armazenamento: Armazenar em local limpo e seco.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Anvisa nº: 8003400084

Fabricado por: Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares
Ltda. Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP CEP: 09370-850 –
CNPJ: 02.881.877/0001-64 - Indústria Brasileira
Responsável Técnica: Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339
Atendimento ao cliente: SAC: 0800 191099 – sac@polarfix.com.br –
www.polarfix.com.br