

INSTRUÇÕES DE USO

FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL

REGISTRO ANVISA Nº: 81846480001

NOME TÉCNICO: FRASCO DE ALIMENTAÇÃO

INDICAÇÃO:

Os Frascos para Nutrição Enteral foram desenvolvidos para acondicionamento e administração de nutrições enterais preparadas em hospitais para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente.

FORMA DE APRESENTAÇÃO:

PREMA-DIET - 300 mL - Tampa Pressão / Ponta Cruz
PREMA-DIET - 500 mL - Tampa Pressão / Ponta Cruz
PREMA-DIET - 1000 mL - Tampa Pressão / Ponta Cruz
PREMA-DIET - 100 mL - Tampa Rosca
PREMA-DIET - 300 mL - Tampa Rosca
PREMA-DIET - 500 mL - Tampa Rosca
PREMA-DIET - 1000 mL - Tampa Rosca
PREMA-DIET - 100 mL - Tampa Pressão / Ponta Luer
PREMA-DIET - 300 mL - Tampa Pressão / Ponta Luer
PREMA-DIET - 500 mL - Tampa Pressão / Ponta Luer
PREMA-DIET - 1000 mL - Tampa Pressão / Ponta Luer
PREMA-DIET - 100 mL - Tampa Pressão / Ponta Cruz

MANIPULAÇÃO / MODO DE USO:

Retirar o produto da embalagem com técnica asséptica.

A preparação deve ser executada conforme fórmula prescrita.

Após preparação, colocar tampa e rosqueá-la até que ocorra o travamento, garantindo a inviolabilidade até o momento da administração.

No momento da administração conecta o equipo adequado a tampa*.

Aplicar o rótulo auto-adesivo no frasco, devidamente preenchido.

Data de fabricação, validade e lote: vide rótulo auto-adesivo e frasco.

O frasco deverá ser inutilizado (descartado) após o uso.

O profissional da saúde deve ser devidamente habilitado para a função e é responsável pela preparação da solução e a administração da mesma nos pacientes, obedecendo a horários pré-estabelecidos.

Quaisquer instruções recomendadas pelo fabricante para o uso correto do dispositivo não devem substituir o treinamento do responsável apropriado segundo as normas sanitárias vigentes.

Uso enteral!

Não aplicar na veia!

Produto descartável!

Tipos de Conexões para tampa:

- Tampa Luer
 - Utilizar equipo Ponta Lanceta



- Tampa Cruz
 - Utilizar equipo Ponta Cruz



ADVERTÊNCIAS:

Inutilizar após o uso.

PRECAUÇÕES:

Fazer a assepsia do frasco antes de acondicionar a nutrição recém-preparada. Rosquear ou cravar a tampa conforme tipo de frasco e aplicar o rótulo adesivo, contendo as informações solicitadas. Não usar se a embalagem de acondicionamento não estiver íntegra.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar e Transportar em temperatura ambiente (15° a 30°C) ao abrigo da luz e umidade.



Rua Resende da Costa, L T 05 QD 62 – Guaxindiba
São Gonçalo – RJ – CEP 24.722-291 Tel 21 97684-0491
CNPJ 26.117.900/0001-07 IE 82.214.311
Email: qualidade@premahospitalar.com.br

DETENTOR DO REGISTRO:

PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 26.117.900/0001-07

RUA RESENDE DA COSTA - LOTE 05 - QUADRA 62, S/N - BOM RETIRO, SÃO GONÇALO - RJ

CEP:24.722-921

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – AFE nº 8.18.464-8 (1L7162L0W6WY)

REGISTRO ANVISA Nº: 81846480001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NILMA CLAUDIA GOMES DA SILVA – CRF/RJ: 25017

PRODUTO NÃO ESTÉRIL

O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.