

# **INSTRUÇÕES DE USO**

## **Kit Explante 1**

**Notificação ANVISA nº: 10237619033**

### **Modelos:**

Composto por: 1 Pinça Kelly, 1 Pinça Anatômica, 1 Bisturi nº 15, 5 Compressas de Gaze 7,5x7,5 cm dobrada, 1 Seringa 3 mL Luer Lock sem Agulha, 1 Agulha 13x0,45 mm, 1 Campo para Cobertura de Mesa 40x40 cm e 1 Fio de Nylon Agulhado 5-0.

Composto por: 1 Pinça Kelly, 1 Pinça Anatômica, 1 Bisturi nº 21, 5 Compressas de Gaze 7,5x7,5 cm dobrada, 1 Seringa 3 mL Luer Lock sem Agulha, 1 Agulha 13x0,45 mm, 1 Campo para Cobertura de Mesa 40x40 cm e 1 Fio de Nylon Agulhado 5-0.

**Detentor da Notificação ANVISA e fabricante:**

Kolplast CI Ltda.

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418 – Bairro da Mina – Itupeva – SP – CEP 13.299-364

Contato: 11-4961-0900 – e-mail: [sac@kolplast.com.br](mailto:sac@kolplast.com.br)

Website: [www.kolplast.com.br](http://www.kolplast.com.br)

Responsável Técnico: Maria Izabel M. Viana Fittipaldi CRF/SP 14.118

**Produto Estéril: Óxido de Etileno**

Não utilizar se a embalagem estiver aberta e/ou danificada.

**Advertências e Precauções:**

Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.

Produto de uso único, descartar após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.

Produto de uso exclusivo de profissional habilitado para realização do procedimento.

**Condições específicas de armazenamento, conservação e manipulação do produto:**

Temperatura: de 8°C a 55°C

Umidade: 40% a 75%

O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.

**Finalidade:**

O kit contém os materiais necessários para auxiliar no procedimento de inserção ou retirada de implante contraceptivo subdérmico.

**Modo de uso:**

- Abrir a embalagem empregando técnica asséptica;
- Retirar o campo e posicionar sobre a mesa auxiliar;
- Utilizar a seringa 3 mL Luer Lock e a agulha 13x0,45mm para infiltração de anestésico local no tecido subcutâneo;
- Realizar a incisão cutânea com o bisturi;
- Manipular e estabilizar os tecidos com a pinça anatômica e a pinça Kelly, conforme a necessidade do procedimento (inserção ou retirada do implante contraceptivo).
- Utilizar as compressas de gaze para absorção de sangue e secreções.
- Após a conclusão do procedimento, realizar a aproximação dos tecidos com o fio de nylon 5-0 agulhado.
- Descartar todos os itens após o uso, conforme normas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

**Emissão e revisão:**

Revisão 00

Emitida em 30/09/2025