

Gel Pack Max

Compresa caliente y fría



USO EN FRÍO

Refrigerador: Dejar en el refrigerador por lo menos 1 hora antes de usar.

Congelador: Congelar por al menos 30 min antes de usar.



USO EN CALIENTE

Microondas: Calentar por 30 segundos. Si no cabe extendido, doblar por la mitad, calentar por 20 segundos y voltear para calentar por otros 20 segundos para una temperatura uniforme. En caso de ser necesario, aumentar el tiempo de calentamiento en intervalos de 10 segundos hasta alcanzar la temperatura deseada. Apagar inmediatamente el microondas si la compresa comienza a hincharse.

Agua hirviendo: Colocar la compresa en agua hirviendo (que no esté directamente sobre la estufa) durante máximo 40 segundos.

Usar sobre el cuerpo o fijar con ayuda de la banda con velcro en el área a tratar, en periodos de 10 a 15 minutos.

ALMACENAMIENTO

Mantener la compresa alejada del calor extremo y directo. Almacenar en un lugar seco. La compresa es reutilizable. Te recomendamos mantener siempre una compresa en el refrigerador para su uso inmediato.

RECOMENDACIONES

- Probar al tacto la temperatura de tu compresa antes de colocarla sobre la piel.
- De preferencia envolver la compresa con un paño o toalla antes de aplicarla sobre la piel. No colocar la compresa directamente sobre la piel.
- Las personas con problemas circulatorios NO deben utilizar la compresa, excepto bajo la supervisión directa de un médico.
- Si la aplicación de la compresa con frío o calor llega a ser incómoda, retirar el producto por unos minutos y después volver a aplicar.

ADVERTENCIAS

- No perforar la bolsa. Si la bolsa se rompe y el líquido tiene contacto con piel u ojos, lavar con agua inmediatamente y consultar a un médico.
- Nocivo para la salud si se ingiere. Si la solución es ingerida, beber varios vasos con agua y consultar a un médico inmediatamente.
- No dejar al alcance de los niños, ni mascotas y no mezclar con materiales combustibles.
- El producto no es un medicamento y no debe ser utilizado para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades, Betterware no se responsabiliza del uso diferente al sugerido o en personas sensibles a los componentes del producto, por lo que recomendamos probar antes de su uso y suspender la aplicación ante cualquier eventualidad.