




26203

Rodillera Gel Pro

Rodillera

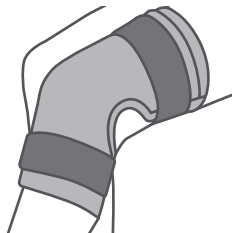

Conoce más
del producto
AQUÍ



Ver instructivo para su uso adecuado.



ENFRÍA

Deja en el refrigerador por lo menos 1 hora antes de usar y coloca sobre la rodilla.



CALIENTA

Calienta en microondas por 40 segundos y coloca sobre la rodilla. En caso de ser necesario, aumentar el tiempo de calentamiento en intervalos de 10 segundos hasta alcanzar la temperatura deseada. Apaga inmediatamente el microondas si la rodillera comienza a hincharse.

RECOMENDACIONES

- Probar al tacto la temperatura antes de colocarla sobre la rodilla.
- Si la aplicación del producto llegara a ser incómodo, retira por unos minutos y vuelve a colocar.

ADVERTENCIAS

- No perforar la bolsa. Si la bolsa se rompe y el líquido tiene contacto con piel u ojos, lavar con agua inmediatamente y consultar a un médico.
- Nocivo para la salud si se ingiere. Si la solución es ingerida, beber varios vasos con agua y consultar a un médico inmediatamente.
- No dejar al alcance de los niños, ni mascotas y no mezclar con materiales combustibles.
- El producto no es un medicamento y no debe ser utilizado para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades, Betterware no se responsabiliza del uso diferente al sugerido o en personas sensibles a los componentes del producto, por lo que recomendamos probar antes de su uso y suspender la aplicación ante cualquier eventualidad.