




26242

Better Medias Compress

Medias de compresión

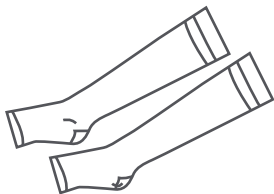

Ver instructivo para su uso adecuado.

1 Usa



- Un ajuste correcto es esencial para la comodidad y la seguridad. Mide pantorillas y pies para asegurar una talla adecuada.
- **Rango de circunferencias sugeridas del usuario:** pantorrilla 20–30 cm; pie 18–27 cm.
- Úsalas durante el día y retíralas para dormir, salvo indicación médica contraria.
- Evita permanecer inmóvil por largos periodos; realiza descansos con elevación de piernas cuando sea posible.
- Las medias de compresión pierden efectividad con el uso; considera reemplazarlas cada 4–6 meses o cuando notes pérdida de ajuste.
- Lavar a máquina en ciclo delicado o a mano con agua fría, con detergente suave. No usar blanqueadores o suavizantes de telas.
- Secar al aire. No planchar.
- Si presentas molestias o irritación, suspende su uso.

NOTA: El producto promueve la circulación venosa en piernas y pies durante actividades, viajes largos o periodos prolongados de pie o sentado. No sustituye la valoración, diagnóstico ni tratamiento médico.

HECHO EN CHINA PARA BETTERWARE DE MÉXICO Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350 R.F.C. BME9501252P0.
COLOMBIA: Importado por: Betterware Colombia S.A.S. NIT: 902009502-9.
ECUADOR: Importado por: Betterware Ecuador S.A.S. RUC: 1793223373001 Av. Mariana de Jesús, No. 179, Pichincha, Quito, Iñaquito, Ecuador.