

Masques chirurgicaux médicaux IIR

Type IIR

Non stérile

Certifié CE

EN 14683:2019


Filtration des bactéries $\geq 98\%$

Conditionné en paquet de 10

Distribution plus hygiénique et Sécurisée.

50 masques (5x10)/boite

40 boites/carton

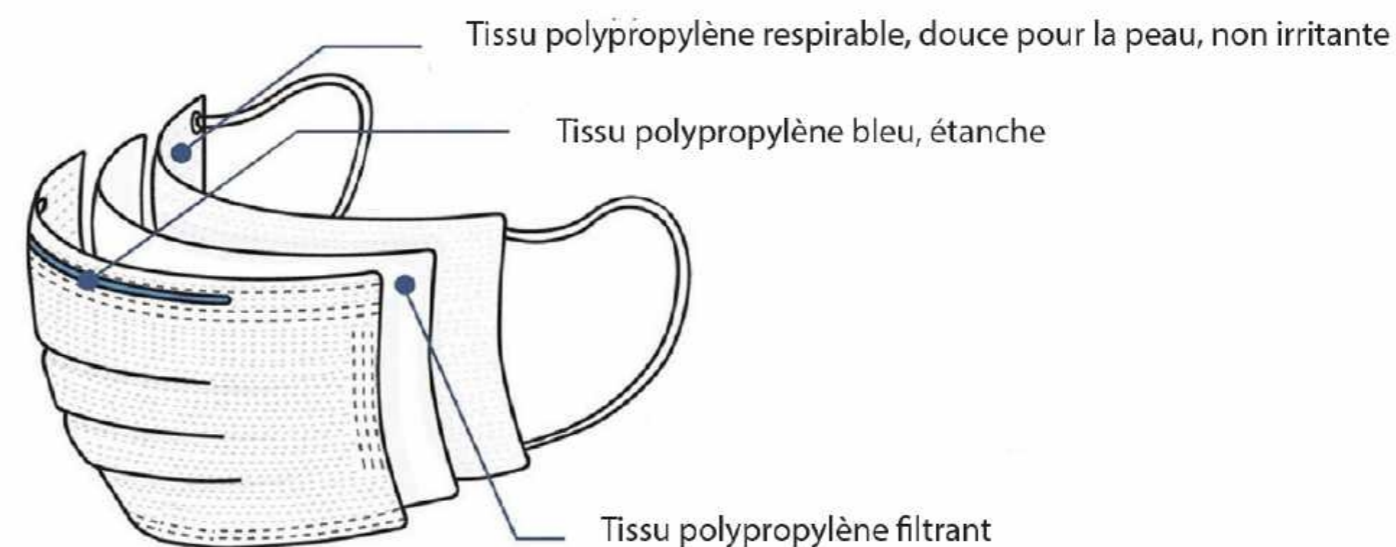

Les masques chirurgicaux 3 plis de type IIR répondent à la norme EN14683 qui requiert une efficacité de filtration bactérienne (EFB) pour des bactéries de plus de 3μ de $>98\%$ Cette norme ne requiert pas de filtration des particules (EFP).

MASQUE MEDICAL TYPE II R



Masque Chirurgical Jetable EN14683:2019 + AC:2019 TYPE II R

[Modèle et spécification]

Modèle : MSYCY-01 spécification : 175x95mm non stérile

[Précautions]

1. Ce produit est à usage unique et la durée d'utilisation recommandée est de 4 heures.
2. Veuillez vérifier l'emballage et la date de production avant utilisation. N'utilisez pas si l'emballage ou le masque est endommagé. En cas de dyspnée, d'endommagement et de pollution du masque (tache de sang, gouttelettes et autres corps étrangers) etc, changez votre masque.
3. Le masque est un moyen de protection complémentaire, qui ne remplace pas les gestes de barrières.

[Instructions d'utilisation]

1. Lavez vous les mains puis ouvrez le masque, orientez le côté avec barrette nasale vers le haut, la face blanche vers l'intérieur et la face colorée vers l'extérieur.
2. Placez les élastiques du masque sur les deux oreilles.
3. Appuyez légèrement sur la barrette nasale pour l'adapter à l'arête du nez, puis ajuster l'extrémité inférieure du masque sur le menton.

4. Pour le retirer vous ne touchez que les élastiques.
5. Jetez votre masque usé dans une poubelle fermée puis lavez vous les mains.

[Méthode de stockage]

Le produit doit être stocké à température ambiante entre -20°C/+40°C bien aéré à l'abri du soleil avec une humidité relative non supérieure à 75%.

[Période de validité]

2ANS après production

[Principaux matériaux]

Tissu non-tissé 65%, Tissu soufflé par fusion 35%

Fabriqué en CHINE

Les côtés de la boîte



A l'intérieur de la boîte Sachets de 10pcs X 5 Peut être vendu séparément

