


Het afnemen van een ontlastingsmonster:

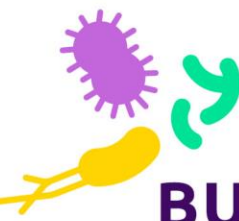

INNER BUDDIES

THE
UNIVERSE
INSIDE
YOU

1. Maak bij het afnemen van een ontlastingsmonster gebruik van de fecesvangervang (↓ **zie rechter afbeelding**) zodat de ontlasting niet in aanraking komt met het water, de urine en de toiletput. Voor een uitgebreidere uitleg zie de gebruiksaanwijzing op de 'Faeces Catcher' (fecesvangervang).



2. Draai het buisje (↑ **zie linker afbeelding**) open, *laat de vloeistof in het buisje* (de vloeistof staat niet op de afbeelding) en neem met de lepel in de bruine dop het ontlastingsmonster af.
3. Zorg dat de lepel gevuld is en plaats het weer terug in het buisje met de vloeistof. Let op dat de lepel niet in aanraking komt met de toiletput omdat schoonmaakmiddelen of desinfectiemiddelen de uitslag kunnen beïnvloeden. *Neem slechts 1 keer een schepje, het buisje hoeft niet vol met poep!*
4. Draai het buisje (↑ **zie linker afbeelding**) dicht, *laat de vloeistof in het buisje* (de vloeistof staat niet op de afbeelding) en schud het buisje voor 30 seconde op en neer zodat een homogene substantie ontstaat. Dit ziet er dan ongeveer zo uit (echter met een *bruine* dop):



5. Stop het buisje in de sealbag (↓ **zie linker afbeelding**) en stop de sealbag in de retourenvelop (↓ **zie rechter afbeelding**). Zorg ervoor dat beide zakjes goed zijn afgesloten. Voor een uitgebreidere uitleg zie de gebruiksaanwijzing op de 'Rigid SafetyBag' (sealbag) en de 'CoverMedMini' (retourenvelop).



6. Breng de retourenvelop indien mogelijk diezelfde dag nog naar een postkantoor of naar een brievenbus (een postzegel is hiervoor niet nodig). NB: Bij extreme weersomstandigheden (zoals een hittegolf of vorst) graag op een postkantoor afleveren en niet in een brievenbus deponeren.