

Toma de una muestra de heces:



1. Al tomar una muestra de heces, utilice el recogedor de heces (↓ véase la imagen de la derecha) para que las heces no entren en contacto con el agua, la orina y la taza del inodoro. Para obtener una explicación más detallada, consulte las instrucciones de uso del 'Faeces Catcher'.



2. Abra el tubo (↑ véase la imagen de la izquierda), deje el líquido en el tubo (el líquido no aparece en la imagen) y recoja la muestra de heces con la cuchara de la tapa marrón.
3. Asegúrese de que la cuchara esté llena y vuelva a colocarla en el tubo con el líquido. Tenga cuidado de que la cuchara no entre en contacto con el inodoro, ya que los productos de limpieza o desinfectantes pueden afectar al resultado. Tome solo una cucharada, ¡no es necesario llenar el tubo con heces!
4. Cierre el tubo (↑ véase la imagen de la izquierda), deje el líquido en el tubo (el líquido no aparece en la imagen) y agite el tubo durante 30 segundos para obtener una sustancia homogénea. El resultado será similar al siguiente (pero con una tapa marrón):



5. Introduzca el tubo en la bolsa sellada (↓ véase la imagen de la izquierda) y meta la bolsa sellada en el sobre de devolución (↓ véase la imagen de la derecha). Asegúrese de que ambas bolsas estén bien cerradas. Para obtener una explicación más detallada, consulte las instrucciones de uso de la 'Rigid SafetyBag' y la 'CoverMedMini'.



6. Si es posible, lleve el sobre de devolución a una oficina de correos o a un buzón el mismo día (no es necesario poner sello). Nota: en condiciones climáticas extremas (como olas de calor o heladas), entréguelo en una oficina de correos y no lo deposite en un buzón.