

ref. 53907

MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR



Función

Mascarilla médica desechable, que filtra más del 98% de las partículas y permite respirar cómodamente durante el turno de trabajo. No es estéril. Fabricada en polipropileno, no tejido, material filtrante de 3 capas y tira metálica.

Especificaciones técnicas

Material	100% fibra de polipropileno
Medidas	17,5x9,5cm
Tipo	IIR clase I
Eficiencia de filtración bacteriana	99,92 ± 0,07
Presión diferencial	41,1 ± 0,5
Presión de resistencia a las salpicaduras	21,3 kPa

Requerimientos:

- EN 14683: 2019 + AC: 2019

Instrucciones

- ✓ Lávese previamente las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.
- ✓ Colocar la mascarilla y ajustar el clip en la nariz, cubriendo el anillo.
- ✓ No llevar la mascarilla durante más de 4 horas ni tocarla con la mano durante su uso.
- ✓ Sustitúyala si está húmeda o dañada.
- ✓ Retirarla sin tocar la parte delantera y desecharla en el contenedor de la bolsa de plástico correspondiente
- ✓ No debe colocarse sobre la frente o la barbilla durante o después de su uso.



Presentación

Bolsa de 50 unidades por caja

