

Otoscópio de ouvido com câmera WiFi 1080p

REF. 095-4370



INTRODUÇÃO

1. Não utilize este dispositivo se tiver uma infecção ativa no ouvido, tímpano perfurado ou vermelhidão. Interrompa o uso imediatamente e procure ajuda médica se sentir dor durante o uso.
2. Leia atentamente as instruções. Não assumimos responsabilidade por qualquer lesão causada pelo uso inadequado dos nossos produtos. Em caso de drenagem auricular, inflamação, dor no ouvido, perfuração ou lesão do canal auditivo, consulte um médico antes de usar.
3. A aplicação descarregada ajuda a visualizar o cerúmen (cera) do canal auditivo. Mantenha o bico de irrigação a uma distância segura do tímpano.
4. Insira o dispositivo no canal auditivo com cuidado para evitar danos. Não insira o dispositivo muito profundamente.
5. Se o cerúmen for difícil de remover, use gotas para os ouvidos durante alguns dias para amolecê-lo antes de proceder à remoção.
6. Evite pressionar demais o canal auditivo ao remover o cerúmen para evitar arranhões.
7. Se, ao usar o dispositivo pela primeira vez, houver uma acumulação significativa de cerúmen, interrompa o uso e consulte um médico para evitar irritações.
8. Após o uso, sempre desinfete os acessórios e o dispositivo com álcool. Durante a limpeza, limpe bem com um pano embebido em álcool. É proibido mergulhar o dispositivo em água.
9. É proibido usar este dispositivo durante o carregamento.
10. É proibido que crianças utilizem este produto sozinhas.

DOWNLOAD DA APLICAÇÃO






Compatível com dispositivos:

- Android: Versão 4.4
- iOS: 9.0 ou superior
- **Dispositivos Android:** Samsung S7, Galaxy S6 edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, Pixel XL, Pixel 3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus, etc.
- **Dispositivos iOS:** como iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, etc.

AVISO:

Este dispositivo não é compatível com computadores.

PASSOS DE CONFIGURAÇÃO


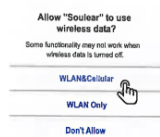
PASSO 1	PASSO 2
<p>Para iOS: Faça o download da aplicação "Soulear" na App Store.</p> <p>Para Android: Faça o download da aplicação "Soulear" na Google Play Store.</p> <p>Ou utilize o código QR para aceder à página de download.</p> 	<p>Pressione o botão de ligar por cerca de 5 segundos.</p>  <p>Após ligar, o botão começará a piscar</p>
PASSO 3	PASSO 4
<p>Abra a aplicação previamente descarregada e seleccione "Connect Device". Siga as instruções e vá para as configurações de Wi-Fi no seu telemóvel.</p> 	<div> <p>1. Encontre "Soulear-xxxx" nas configurações de Wi-Fi e conecte-se a essa rede.</p>  </div> <div> <p>2. Após se conectar a "Soulear-xxxx", volte à aplicação e seleccione "Connected".</p>  </div>

PERMISSÕES NECESSÁRIAS

Após estabelecer a conexão, serão exibidas várias mensagens.


Se o seu telemóvel exibir as seguintes mensagens, siga as instruções:

iOS:

<p>1. "Soulear" gostaria de encontrar e conectar-se a dispositivos na sua rede local. Esta aplicação poderá descobrir e conectar-se aos dispositivos na rede que você utiliza. Seleccione "OK".</p> 	<p>2. Permitir que "Soulear" use dados sem fio? Algumas funcionalidades podem não funcionar quando os dados sem fio estiverem desligados. Seleccione "WLAN & Cellular" ou "WLAN Only", dependendo da sua preferência.</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Android:

Siga as instruções específicas para configurar permissões necessárias.

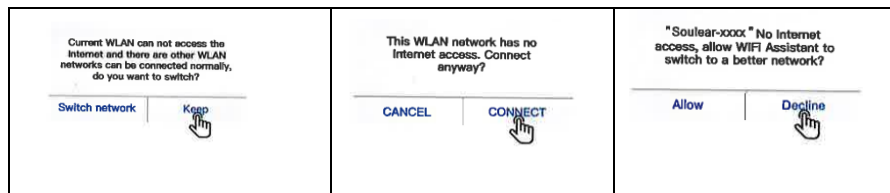

ACESSÓRIOS

Pontas Substituíveis: 5 unidades



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Verificação Inicial:** Antes de utilizar, assegure-se de que a capa de silicone substituível está devidamente instalada na posição designada para evitar que se solte (conforme ilustrado na imagem).



- Primeiro Uso:** Ao utilizar pela primeira vez, toque suavemente a colher no canal auditivo e, em seguida, utilize a aplicação para auxiliar o procedimento.
- Limpeza das Pontas:** Antes de cada uso, recomenda-se limpar as pontas com lenços humedecidos ou um pano embebido em álcool.
- Substituição de Acessórios:** Troque os acessórios conforme necessário.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
Não é possível salvar fotos ou vídeos no telemóvel	Permitir que a aplicação faça alterações na galeria do telemóvel.
A câmara não responde, não liga	Carregar o dispositivo.
A aplicação fica bloqueada	Desinstale e reinstale a aplicação.
A imagem ao vivo não aparece ao abrir a aplicação	1. Verifique se o dispositivo está conectado à rede Wi-Fi "Soulear-xxxx". 2. Se, durante a configuração da aplicação, não concedeu permissão para aceder à rede Wi-Fi e outras permissões, ajuste isso nas configurações do telemóvel. 3. Ignore a rede Wi-Fi "Soulear-xxxx" no seu telemóvel e conecte-se novamente. 4. Desligue e ligue a aplicação. 5. Desligue e ligue o telemóvel.
Luz vermelha no dispositivo	Carregue o dispositivo.
Conexão interrompida	Desligue e ligue o dispositivo, abra a aplicação e conecte-se ao Wi-Fi novamente.
Quando aparecer a mensagem "cannot join this WiFi, the network is temporarily unavailable, please try again later"	Desligue e ligue o dispositivo por 30 segundos e tente conectar-se novamente à rede Wi-Fi.
Quando aparecer a mensagem no telemóvel Android "Network access is full"	Desligue e ligue o dispositivo por 30 segundos e tente conectar-se novamente à rede Wi-Fi.

PARÂMETROS DO OTOSCÓPIO DIGITAL

Frequência	2.4Ghz	Tensão	3.7V~4.2V
Padrão de rede	IEEE 802.11b/g/n	Alimentação	5V=0.4A
Sensor de imagem	CMOS	Dimensões da câmara	3.5mm
Velocidade de transmissão	30fps	Potência	0.75W
Capacidade da bateria	240mAh	Resolução	1080P
Temperatura de operação	10-50 °C	Distância focal ideal	1.5-2cm
Tempo de carregamento	1.5h	Porta de carregamento	USB 2.0
Tempo de operação da bateria	Cerca de 70 minutos		