

Natural Cycles

Käyttöohjeet

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin aloitat Natural Cyclesin käytön.

Käyttötarkoitus

Natural Cycles on itsenäinen ohjelmistosovellus, jonka tarkoituksena on tarkkailla naisen hedelmällisyyttä. Sitä voidaan käyttää raskauden ehkäisyyn (ehkäisy) tai raskauden suunnitteluun (hedelmöitys).

Natural Cycles on tarkoitettu aikuisten naisten (**18-vuotiaiden ja vanhempien**) käytettäväksi hedelmällisyyden seurantaan raskauden ehkäisemiseksi tai suunnittelemiseksi. Natural Cycles sopii parhaiten ehkäisykäyttöön ennen vaihdevuotia naisille, joilla on melko säännöllinen ja ovulatoorinen kuukautiskierto.

Vasta-aiheet

Natural Cyclesin käytölle ei ole tunnettuja vasta-aiheita.

Natural Cycles ei ehkä ole oikea sinulle, jos

- Raskaus aiheuttaisi terveydentilasi takia merkittävän vaaran äidille tai sikiölle. Natural Cyclesin käyttö ei takaa sataprosenttisesti, että et tule raskaaksi. Jos raskaus aiheuttaa merkittävän riskin, keskustele lääkärisi kanssa siitä, mikä on paras ehkäisymenetelmä sinulle.
- Käytät parhaillaan hormonaalista ehkäisyä tai käyt läpi hormonihoidon, joka estää ovulaation. Jos teet niin, ollen sovellus näyttää suuri määrä punaisia päiviä. Voit käyttää Demo-tilaa, kunnes lopetat hormonaalisen ehkäisyn tai hoidon.
- Kuukautiskiertosi on erittäin epäsäännöllinen. Hedelmällisyytesi ennustaminen on näissä olosuhteissa vaikeampaa, ja näin ollen sovellus näyttää enemmän punaisia päiviä, mikä voi vähentää tyytyväisyyttäsi Natural Cyclesiin ehkäisymenetelmänä.

Varoitukset

- ⚠ Mikään ehkäisymenetelmä ei ole täysin tehokas. Natural Cycles ei takaa, että et voi tulla raskaaksi. Se vain ilmoittaa sinulle, voitko tulla ja milloin voit tulla raskaaksi sovellukseen syöttämiesi tietojen perusteella.
- ⚠ Punaisina päivinä sinun tulee joko pidättäytyä yhdynnästä tai käyttää ehkäisyä, kuten kondomia, raskauksien ehkäisemiseksi.
- ⚠ Natural Cycles ei suojaa sukupuolitaudeilta. Käytä ehkäisyä, kuten kondomia, suojautuaksesi sukupuolitaudeilta.
- ⚠ Tarkista aina hedelmällisyytesi tila kullekin päivälle. Huomaa, että tulevien päivien hedelmällisyysennusteet ovat vain ennusteita ja ne voivat muuttua tulevaisuudessa. Jos olet epävarma hedelmällisyytesi tilasta etkä voi käyttää sovellusta, pidättäydy yhdynnästä tai käytä ehkäisyä.
- ⚠ Jos käytät laitetta demo-tilassa, huomaa että se on tarkoitettu vain antamaan tietoa ja ohjeita, eikä näytä todellista tietoa. Älä käytä Demo-tilassa näkyviä tietoja ehkäisyä tarkoituksiin.

- ⚠ Jos lopetat hormonaalisen ehkäisyn, saatat kokea välivuotoa, joka on paljon todellista kuukautisvuotoa kevyempää. Normaalit kuukautiset palaavat yleensä muutamassa viikossa. Välivuotoa ei tule merkitä "kuukautiseksi".
- ⚠ Jos käytät hätäehkäisyä (eli "katumuspilleriä"), älä mittaa ja syötä peruslämpötilaasi seuraavien 7 päivän aikana, kun jälkiehkäisytabletin ylimääräiset hormonit vaikuttavat mittaustuloksiisi. Sinun tulee käyttää estemenetelmää ehkäisynä siihen asti, kunnes seuraavat kuukautisesi alkavat, ennen kuin jatkat Natural Cyclesin käyttöä. Huomaa, että vuoto, jota saattaa ilmetä hätäehkäisyvälineiden käytön jälkeen, ei ole sama kuin tavalliset kuukautiset, eikä sitä pidä syöttää sovellukseen.

Varotoimet

- Natural Cycles ei ehkä sovellu sinulle ehkäisymenetelmänä, jos sinulla on epäsäännöllinen kuukautiskierto ja/tai vaihteleva ruumiinlämpötila, sillä hedelmällisyyden ennustaminen on näissä olosuhteissa vaikeampaa. Epäsäännöllinen kuukautiskierto ei vaikuta Natural Cyclesin tehokkuuteen ehkäisynä, mutta tulet saamaan enemmän punaisia päiviä, mikä voi vähentää tyytyväisyyttäsi Natural Cyclesiin. Näin voi olla:
 - **Jos lopetat hormonaalisen ehkäisyn.** Hormonaalisen ehkäisyn lopettamisen jälkeen voi kulua useita kuukausia ennen kuin kuukautiskierto muuttuu jälleen säännölliseksi. Punaisia päiviä on odotettavissa useammin näiden kuukautiskiertojen aikana, ja näin ollen sinun tulee käyttää ehkäisyä tai pidättäytyä yhdynnästä useammin.
 - **Jos sinulla on sairauksia, kuten useita ovulaatioita, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä tai kilpirauhaseen liittyviä ongelmia.** Voit silti käyttää Natural Cyclesia hedelmällisyytesi seurantaan.
 - **Jos imetät.** Imettämisen aikana et ovuloi ja saat näin ollen vain punaisia päiviä. Voit silti käyttää Natural Cyclesia nähdäksesi, milloin alat jälleen ovuloida.
 - **Jos ilmenee menopaussin oireita.** Voit silti käyttää Natural Cyclesia, jotta tarkkaillaksesi hedelmällisyyttäsi.
- Kun alat käyttää Natural Cyclesia, ainutlaatuisen kuukautiskiertoosi tutustuminen vie muutaman viikon, mikä lisää punaisten päivien määrää ensimmäisten 1–3 kuukautiskierron aikana. Punaisten päivien määrän kasvu varmistaa, että sovellus on tehokas, mutta kun se on tunnistanut ovulaation, saat todennäköisesti enemmän vihreitä päiviä. On tärkeää huomata, että voit luottaa sovelluksen osoittamaan hedelmällisyyttilaan ensimmäisestä päivästä lähtien.
- Varmista, että päivität ohjelmistosovelluksesi, jotta käytössäsi on uusin versio. Natural Cycles suosittelee, että asetat älypuhelimesi päivittämään sovelluksen automaattisesti.
- Jotta lämpötilamittaukset olisivat tarkkoja, käytä aina aamulämpömittaria lämpötilan mittaamiseen.
- Noudata aina "Lämpötilan mittaus" -kappaleen ohjeita ovulaation havaitsemisen tarkkuuden lisäämiseksi.

Tarkistuslista

Aloittaaksesi Natural Cycles -ohjelman käytön tarvitset seuraavat asiat:

1. Natural Cycles -tili

Pääset Natural Cyclesiin selaimellasi menemällä osoitteeseen www.naturalcycles.com. Jos haluat käyttää sovellusta, lataa se Google Playsta tai App Storesta Androidillesi, iPhoneillesi tai iPadillesi. Luo henkilökohtainen tilisi noudattamalla rekisteröintiohjeita. Varmista internetyhteytesi laitteella, jonka kautta käytät Natural Cyclesiä. Natural Cycles -tilisi on henkilökohtainen ja tarkoitettu vain sinun käytettäväksesi.

2. Aamulämpömittari

Päästäksesi alkuun tarvitset aamulämpömittarin, joka on herkempi kuin tavallinen kuumemittari, sillä se näyttää lämmön kahden desimaalin tarkkuudella. Ruumiinlämpösi vaihtelu on melko pientä, joten saadaksesi kaiken irti Natural Cycles -ohjelmasta ja enemmän vihreitä päiviä tarvitset oikeanlaisen mittarin. Jos valitset Natural Cyclesin vuositulauksen, saat aamulämpömittarin ilmaiseksi. Voit myös ostaa sen verkkokaupastamme osoitteessa shop.naturalcycles.com.

3. Ovulaatiotestit (valinnainen)


Ovulaatio- eli LH-testit ovat vapaaehtoisia, mutta ne voivat auttaa sinua ovulaation tunnistamisessa. Ne ovat yksinkertaisia virtsanäytteitä, jotka sinun tarvitsee ottaa vain kiertosi muutamana päivänä. Testien tulokset voivat lisätä vihreiden päivien määrää ehkäistessäsi raskautta, mutta ne eivät ole sovelluksen toiminnan kannalta ehdottomia. Suosittelemme erityisesti testien tekemistä, jos suunnittelet raskautta, sillä ne auttavat määrittelemään ovulaatiosi tarkasti. Voit ostaa ovulaatio- eli LH-testejä verkkokaupastamme osoitteessa shop.naturalcycles.com.

Ruumiinlämmön mittaaminen

Mittausohjeet

Noudata näitä vaiheita ruumiinlämpösi mittaamisessa:

1. Aseta lämpömittari suuhun kielesi alle, niin syväälle kuin mahdollista, kielenkannan viereen alla olevien kuvien osoittamalla tavalla.

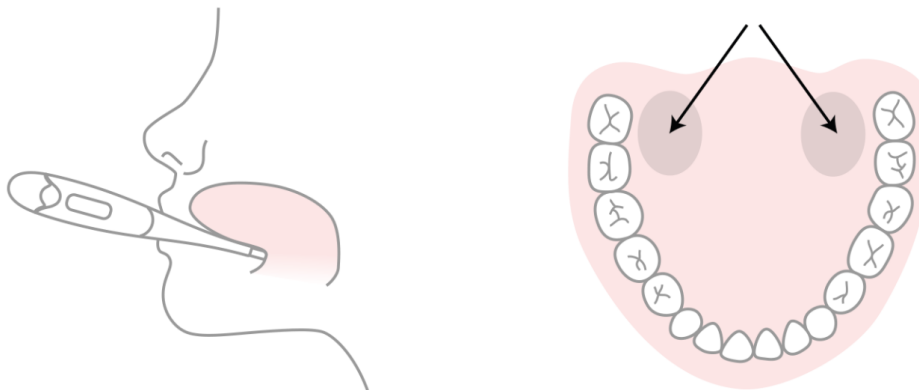

2. Paina "on"-painiketta vasta, kun lämpömittari on kunnolla paikoillaan suussasi.
3. Pyri olemaan paikoillasi mittaamisen aikana, sulje suusi, jotta sinne ei pääse viileää ilmaa ja hengitä nenän kautta.
4. Odota, kunnes mittari päästää piippausäänen (noin 30 sekuntia).
5. Kun olet saanut ruumiinlämpölukemasi, lisää se sovellukseen.

Voit käyttää sovelluksen "Lisää"-sivulla olevaa kalibrintityökalua tarkistaaksesi, mittaatko oikein. Lämpömittari tallentaa lukemasi, joten voit tarkistaa sen myöhemmin. Voit tehdä tämän painamalla "on"-painiketta kerran, jolloin tallennettu lukema ilmestyy näytölle muutaman sekunnin ajaksi ennen nollautumista. Vinkki mittaamisen muistamiseksi: aseta lämpömittari puhelimesi päälle ennen nukkumaanmenoa.

Mittausajankohta

Mittaa ruumiinlämpösi vain kerran päivässä, mutta mahdollisimman monena päivänä – se johtaa parempiin tuloksiin. Pyri mittaamaan vähintään 5 kertaa viikossa.

Mittaa heti ensimmäiseksi aamulla, ennen kuin nouset sängystä. Mittaa suunnilleen samaan aikaan ja nukuttuasi suunnilleen saman verran (+/- 2 tuntia).

Milloin mittausta ei tule tehdä

Tietyt tilanteet voivat vaikuttaa aamulämpöösi, jolloin ohjelma voi havaita ovulaation tai näyttää vihreitä päiviä virheellisesti:

- epäsäännöllinen uni (+/- 2 tuntia normaaliin verrattuna)
- unettomuus
- ruumiinlämpösi mahdollisesti vaikuttavan lääkkeen käyttö
- runsas alkoholinkäyttö ja krapulan tunne
- huumeiden käyttö
- yhdyntä aamulla ennen mittausta
- runsas liikunta edellisenä iltana
- tulehdus tai sairas olo
- kova stressitila
- työskentely runsaan paineen alaisena
- olet matkalla
- muuttanut unirytmiasi viimeisten 24 tunnin aikana.

Näissä olosuhteissa voit joko olla mittaamatta lämpöäsi sinä päivänä – napauta tällöin ”Ohita tänään” -painiketta – tai voit napauttaa ”Eroava lämpötila” -kohtaa tiedonsyöttönäkymässä. Tällöin algoritmi ei käytä lukemaa laskelmissaan.

Ehkäisy: Ehkäise raskaus

Toimintaohjeet

Joka-aamuinen rutiinisi:

1. Mittaa ruumiinlämpösi heti ensimmäiseksi herättyäsi, ennen kuin nouset sängystä.
2. Kun olet mitannut ruumiinlämpösi, lisää lukema sovellukseen. Tiedonsyöttönäkymä avautuu automaattisesti, tai voit painaa oikeassa yläkulmassa olevaa '+' -merkkiä. Voit myös syöttää lisätietoja, kuten kuukautisesi tai ovulaatio- eli LH-testin tuloksia. Tallennettuasi tämän päivän tiedot sovellus laskee päivän tilasi.
3. Tarkista päivän tilasi. Näet joko vihreän tai punaisen päivän riippuen mahdollisesta ehkäisyntarpeestasi.



Vihreä = Ei hedelmällinen

Vihreinä päivinä et voi tulla raskaaksi, sillä et ole hedelmällinen. Vihreät päivät on ympäröity vihreällä renkaalla.



Punainen = Käytä ehkäisyvälineitä

Punaisina päivinä olet hyvin todennäköisesti hedelmällinen, ja sinulla on riski tulla raskaaksi. Käytä ehkäisyvälineitä (kondomia) tai pidättäydy yhdynnästä ehkäistäksesi raskauden. Punaiset päivät on ympäröity punaisella renkaalla.

Sovellus löytää ja kertoo ovulaatiosi ajankohdan (munasymboli) sekä toteutuneiden ja ennustettujen kuukautistesijaintien ajankohdan (verenpissasymboli). Lisäksi sovellus näyttää tulevien päivien ennusteet Kalenterinäkymässä. Nämä ennusteet voivat muuttua, eikä niitä tule pitää lopullisina tuloksina, ja siksi sinun tulee aina tarkistaa päivän tila – joka päivä.

Kuinka tehokas Natural Cycles on ehkäisyä varten?

Natural Cycles on 93 % tehokas tyypillisessä käytössä. Täydellisessä käytössä, eli jos et koskaan harrasta suojaamatonta yhdyntää punaisina päivinä, Natural Cycles on 99 % tehokas.

Tiedot Natural Cyclesin käytöstä on kerätty 22 785 naiselta, jotka käyttivät sovellusta keskimäärin 9,8 kuukautta. On olemassa kolme yleisesti käytettyä tapaa mitata ehkäisymenetelmien tehokkuutta:

1. **Sovelluksella on 0,5 % menetelmän vikataajuus**, joka kertoo, kuinka usein sovellus näyttää virheellisesti vihreän päivän, vaikka nainen on todellisuudessa hedelmällinen ja tulee raskaaksi oltuaan tällaisena vihreänä päivänä suojaamattomassa yhdynnässä. Tämä tarkoittaa, että vuoden verran sovellusta käyttäneestä 1000 naisesta 5 naista tulee raskaaksi tällaisen virheen vuoksi.
2. **Sovelluksen täydellisen käytön vikataajuus on 1,0**, mikä tarkoittaa, että vuoden verran sovellusta käyttäneestä 1000 naisesta 10 naista tulee raskaaksi seuraavista syistä:
 - a. He olivat suojaamattomassa yhdynnässä vihreänä päivänä, joka oli virheellisesti ilmoitettu ei-hedelmälliseksi päiväksi (eli menetelmävirhe), tai
 - b. He olivat suojatussa yhdynnässä punaisena päivänä, mutta heidän käyttämänsä ehkäisymenetelmä petti.
3. **Sovelluksen tavallisen käytön vikataajuus on 6,8**, mikä tarkoittaa, että vuoden käytön aikana yhteensä 68 naista 1000 naisesta tulee raskaaksi mistä tahansa mahdollisesta syystä (esim. virheellisesti ilmoitetut vihreät päivät, suojaamaton yhdyntä punaisina päivinä ja käytetyn ehkäisymenetelmän pettäminen punaisina päivinä).

Nämä vikataajuudet ovat samalla tasolla kuin muiden ehkäisymenetelmien vikataajuudet: pitkävaikutteinen ehkäisy, kuten ehkäisykierukka ja hormonia erittävät ehkäisyimplantaatit, 1,4 %, hormoni-injektiot 4 %, oraaliset ehkäisyvalmisteet ("pillerit") 7,2 %, kondomit 12,6 % ja keskeytetty yhdyntä 20 %.¹

Ohjeet hormonaalisen ehkäisyn lopettamiseen

Ehkäisyn tyyppi	Milloin voit aloittaa Natural Cyclesin käytön?
Pilleri (Yhdistelmä, keskitaso tai minipilleri)	Suosittellemme, että käytät pakettisi kaikki aktiiviset pillerit. Voit aloittaa Natural Cyclesin käytön heti, kun olet lopettanut. Sinulla on aluksi suuri määrä punaisia päiviä, mutta tämä kehittyy ajan myötä.
Kierukka	Voit aloittaa Natural Cyclesin käytön kierukan poiston jälkeisenä päivänä.
Ehkäisyimplantaatti	Voit aloittaa Natural Cyclesin käytön implantaatin poiston jälkeisenä päivänä.

¹ Sundaram A, Vaughan B, Kost K, Bantolo A, Finer L, Singh S. Contraceptive Failure in the United States: Estimates from the 2006-2010 National Survey of Family Growth. Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2017; 49(1):7-16.

Hormonaalinen laastari, hormonaalinen ehkäisyrengas	Voit aloittaa Natural Cyclesin käytön laastarin tai renkaan poiston jälkeisenä päivänä. Sinulla on aluksi suuri määrä punaisia päiviä, mutta tämä kehittyy ajan myötä.
Ehkäisyruiske	Voit aloittaa Natural Cyclesin käytön, kun injektion vaikutus on kulunut loppuun. Tämä kestää 8–13 viikkoa riippuen siitä, mitä ruisketta käytit.

Jos lopetat hormonaalisen ehkäisyn, saatat kokea välivuotoa, joka on paljon todellista kuukautisvuotoa kevyempää. Normaalit kuukautiset palaavat yleensä muutamassa viikossa. Välivuotoa ei tule merkitä "kuukautisiksi".

Jos tulet raskaaksi Natural Cyclesilla

Jos kuukautisesi ovat myöhässä eikä lämpötilasi laske, saatat olla raskaana, ja sovellus kehottaa sinua tekemään raskaustestin vahvistaaksesi raskauden. Jos testi on negatiivinen eivätkä kuukautiset ala 48 tunnin kuluessa, tee uusi raskaustesti siltä varalta, että teit ensimmäisen testin liian aikaisin raskauden havaitsemiseksi. Jos testi on positiivinen, ota yhteys lääkäriisi.

Suunnittele raskautesi

Jos käytät sovellusta raskauden suunnitteluun—valitset tämän vaihtoehdon tilisi perustamisvaiheessa tai asetuksista—näet yksityiskohtaisemmat tiedot hedelmällisyydestäsi. Tässä moodissa hedelmällisyytesi näytetään asteikkona, jotta huomaat helposti päivät, jolloin sinun on todennäköisintä tulla raskaaksi.



Hedelmälisyys korkeimmallaan	Erittäin korkea hedelmällisyys	Korkea hedelmällisyys	Kohtalainen hedelmällisyys	Alhainen hedelmällisyys	Erittäin alhainen hedelmällisyys	Epävarma	Epätoden näköinen hedelmällisyys
------------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------	----------------------------------

Joinakin päivinä Natural Cycles pyytää sinua tekemään LH- eli ovulaatiotestin lisätäkseen ovulaation tunnistamisen tarkkuutta. Nämä testit ovat valinnaisia. Kun suunnittelet raskautta, suositlemme ehdottomasti tekemään ovulaatiotestejä, sillä lutenisoivaa hormonia (LH) esiintyy kaikkein hedelmällisimpinä päivinä. Jos kuukautisesi ovat myöhässä eikä ruumiinlämpösi tunnu laskevan, suositlemme sinua tekemään raskaustestin raskauden vahvistamiseksi.

Seuraa raskauttasi

Kun olet raskaana, sovellus muuttuu raskausmonitoriksi, joka seuraa sinun ja vauvasi kehitystä. Jatkathan ruumiinlämpösi mittaamista koko raskauden ajan, sillä se voi antaa sinulle ja neuvolahenkilökunnalle hyödyllistä tietoa.

Demo-tila

Jos käytät tällä hetkellä hormonaalista ehkäisyä tai jos sinulla ei vielä ole lämpömittaria, voit käyttää sovellusta Demo-tilassa. Demo-tilassa voit lisätä tietoja tai katsoa sovelluksen esittelyn. Tämä on vain esittelytarkoituksia varten. Tämä tila jäljittelee sitä, miltä sovellus voi näyttää, kun se tutustuu sinuun ja yksilölliseen kuukautiskiertoosi (1–3 kierron jälkeen).

Lopetettuasi hormonaalisen ehkäisyn tai kun olet saanut lämpömittarin, voit aloittaa sovelluksen täydellisen version käytön helposti napauttamalla painiketta 'Aloita ilmainen kuukausi'. Sovellus toimii nyt ehkäisymenetelmänä tai auttaa raskauden suunnittelussa.

Ongelmat/vianmääritys

Jos et pääse sovellukseen, sovellus on vioittunut tai epäilet, että jotain on vialla arvioissasi, toimi seuraavasti:

1. Käytä ehkäisyä, kuten kondomia, kunnes virhe on korjattu.
2. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme sivuston help.naturalcycles.com kautta, niin koulutettu henkilöstömme auttaa sinua.

Sovelluksen yleiskatsaus

Päivän hedelmällisyytilasi on esillä sovelluksen eri näkymissä.

Päivän näkymä

Tässä näkymässä näet kaikki tarvitsemasi tiedot yhdellä vilkaisulla. Näyttö, johon voit syöttää ruumiinlämpösi, ponnahtaa automaattisesti esille avatessasi sovelluksen aamulla. Kun olet syöttänyt lukemasi, saat joko vihreän tai punaisen päivän. Punaisena päivänä sinun tulee käyttää ehkäisyä. Napauta '+' -merkkiä lisätäksesi tietoja, kuten ruumiinlämpösi, kuukautiset tai LH-testitulokset. Voit palata sovellukseen ja päivittää ruumiinlämpösi tai muita tietojasi koska tahansa.

Kuukausinäkymä

Pääset kuukausinäkymään napauttamalla kalenterinäkymän "Kuukausi"-välilehteä. Sieltä näet kuukauden ennustetut punaiset ja vihreät päivät. Ne voivat muuttua ajan kuluessa, eikä niitä siis tule pitää lopullisina tuloksina. Näet, milloin ovulaatiosi tai kuukautisesi ovat tulossa, ja voit helposti tarkastella aiempia tietojasi napauttamalla kutakin päivää. Päivät, joina olet syöttänyt tietoja, on merkitty ruksilla.

Historianäkymä

"Historia"-välilehti on päiväkirja kaikista aiemmin syöttämistäsi tiedoista. Vieritä ylös ja alas selataksesi ruumiinlämpölukemiasi sekä kiertosi päiviä. Lisäksi alla näytetään harmaalla ote muistiinpanoistasi.

Kaavionäkymä

Pääset kaavionäkymään napauttamalla kaaviokuvaketta kohdassa "Päivän näkymä". Kaavio on visuaalinen esitys ruumiinlämpökäyrästäsi. Voit seurata käyrän kehitystä jatkaessasi mittauksia koko kiertosi ajan. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tarkastellaksesi aiemman

kiertosi kaavioita ja napauta “3 kiertoa” tai “9 kiertoa” vertaillaksesi niitä toisiinsa. Näet kirjatut yhdyntät kaavion yllä, ja kuukautisesi, hedelmälliset päiväsi sekä ovulaatiosi osoitetaan eri värein.

Tilastonäkymä

Tämä näkymä antaa sinulle yleiskatsauksen siitä, miltä kiertosi tilastot ja keskimääräinen kiertosi näyttävät kaaviona. Näet kiertosi pituuden ja säännöllisyyden sekä tarkan analyysin kuukautiskiertosi kolmesta vaiheesta – follikulaarisesta, luteaalisesta ja ovulatorisesta vaiheesta. Kaikkien Natural Cyclesia käyttävien naisten keskimääräiset tilastot näytetään omiesi alla vertailun vuoksi. Kiertosi alkaa kierron päivänä 1 (CD1) kuukautistesä ensimmäisestä päivästä ja päättyy, kun seuraavat kuukautisesi alkavat.

Offline-tila

Kun olet offline-tilassa, voit jatkaa lämpötilasi ja muiden tietojen lisäämistä sovellukseen. Offline-tilassa sovellus ei laske hedelmällisyytesi tilaa. Sen sijaan sovellus näyttää oranssin hahmotellun ympyrän, joka ilmaisee tilaksesi "Käytä ehkäisyä", kunnes olet taas online-tilassa ja algoritmi on laskenut tämän päivän hedelmällisyytesi tilan.

Profiilisivu

Tällä sivulla voit nähdä omat asetukset sekä tilaussopimuksesi ja muuttaa niitä. Lisäksi näet vastaanottamasi saavutukset, jotka auttavat sinua tarkkailemaan matkaasi Natural Cycles -ohjelman käyttäjänä.

Sovelluksen sisäiset viestit

Nämä ovat ystävällisiä muistutuksia ja hyödyllisiä tietoja, joita lähetämme sinulle, jotta saat kaiken irti Natural Cycles -kokemuksestasi. Viestit räätälöidään omaan kiertoosi sopiviksi, ja niitä lähetetään vain siinä tapauksessa, että ne ovat sinulle oleellisia. Tutustu omaan kehoosi paremmin, iloitse siitä, että tiedät tulevien kuukautistesä ajankohdan, ja vastaanota monia muita hyödyllisiä tietoja. Viestit voivat sisältää myös ohjeita sovelluksen parempaa käyttöä varten, kuten:

- Jos syötät kohtuuttoman korkean tai matalan lämpötilan, viesti ilmoittaa sinulle välittömästi tarkistaaksesi syötetyn lämpötilan.
- Jos syötät harrastaneesi suojaamatonta yhdyntää Natural Cycles -sovelluksen punaisena päivänä, sinulle näytetään varoitusviesti.
- Sinulle lähetetään sovelluksen sisäinen viesti, jos kuukautisesi ovat myöhässä eikä lämpötilasi laske, koska se osoittaa, että saatat olla raskaana. Viesti kehottaa sinua ottamaan raskaustestin.
- Tiettyinä päivinä sovelluksen sisäinen viesti pyytää sinua tekemään ovulaatiotestin. Ovulaatiotestit ovat valinnaisia, mutta ne voivat auttaa lisäämään vihreiden päivien määrää kuukautiskiertoa kohti.

Muistutukset

Voit halutessasi ottaa käyttöön “Muistutukset” avuksesi Natural Cyclesissa. Tee niin painamalla sovelluksen vasemmassa yläkulmassa olevaa kellokuvaketta. Huomaathan, että sinun on annettava laitteesi asetuksissa Natural Cyclesille lupa lähettää push-ilmoituksia, jotta saat muistutuksia.

Alustan kuvaus

Natural Cycles Sovellusversio: 3.00 ja uudemmat
Lääkinnällisen laitteen versio: B

Laitteet, joilla sovellusta voidaan käyttää:

- Matkapuhelin, jossa on Android OS (versio 6 tai uudempi) tai iOS (versio 10 tai uudempi), 250 kbps tai nopeampi internet.
- Tietokone tai tabletti, jossa on Internet-selain: Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari. 250 kbps tai nopeampi internet.

Yleistä tietoa

Symbolien selitykset



Valmistaja



0123 CE-merkintä



Varoitus



Tarkista käyttöohjeet

EC-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistajan nimi:

NaturalCycles Nordic AB

Valmistajan osoite:

Luntmakargatan 26,
111 37 Tukholma,
Ruotsi

Asiakastuki:

help.naturalcycles.com

Laitteen nimi:

Natural Cycles

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia direktiivin 93/42/ETY mukaisia lääkitteille (MDD) asetettuja vaatimuksia, ja sen CE-merkintä on CE0123.

Julkaisupäivämäärä:

Toukokuu 2018

Asiakirjaversio:

EU & US v2.6