
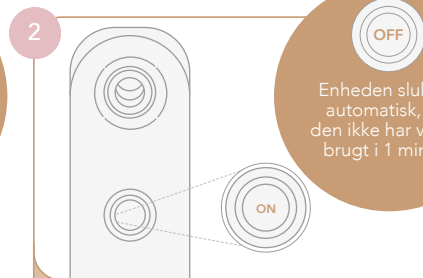


Motiva Flora® Port Locator

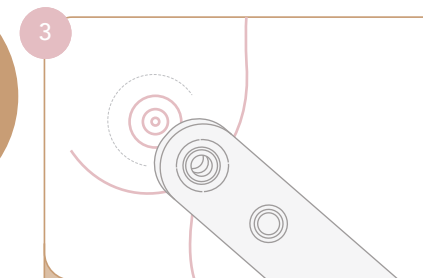
Guide til hurtigopslag

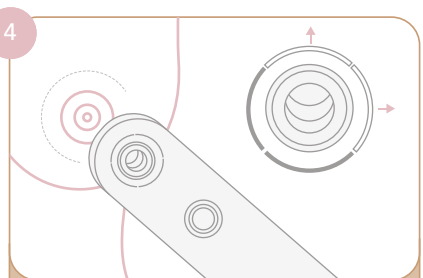
- 

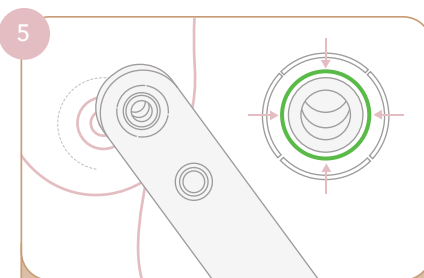
Bekræft uden for det sterile område, at Motiva Flora Port Locator'ens lys tænder, når den er i nærheden af brystvinderen.


Rens og desinficer ved hjælp af en frugtfri bomuldsklud og isopropylalkohol. Brug ALDRIG slibende produkter eller opløsningsmidler.
- 

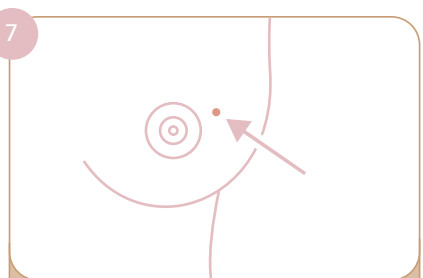
Enhedens slukker automatisk, når den ikke har været brugt i 1 minut.

Tænd Port Locator'en ved at trykke på knappen og slippe den, når den hvide lysende ring tændes.
- 

Placer enhedens øverste del nær brystet, og flyt den rundt for at finde injektionsporten.
- 

Hvide lys guider dig til placeringen af injektionsporten.
- 

Når injektionsporten er lokaliseret, tændes en grøn lysende ring.
- 

Hold enheden stille, og marker placeringen af injektionsporten igennem enhedens åbning med kirurgisk tusch vinkelret på brystet, og/eller tryk hårdt ned på enheden for at danne en midlertidig fordybning på huden, hvor injektionsporten er lokaliseret.
- 

Fjern portfindereren, og brug det markerede område eller midten af fordybningen på huden som guide til injektionsstedet.

BRUGERGRÆNSEFLADE FARVEKODE

ENHED TÆNDT & PORTPLACERING			BATTERISTATUS			RISIKO
ON	PORTPLACERING	PORT FUNDET	LAVT BATTERI	LADER	OPLADET	ALARM
FAST HVIDT	FAST HVIDT	FAST GRØNT	BLINKER ORANGE	BLINKER BLÅT	FAST BLÅT	FAST RØDT
