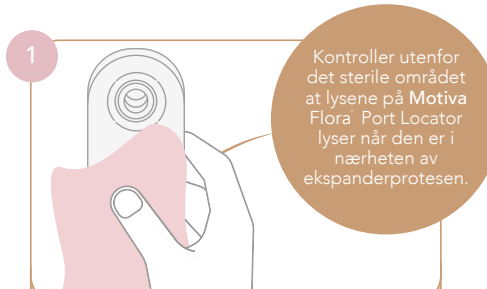
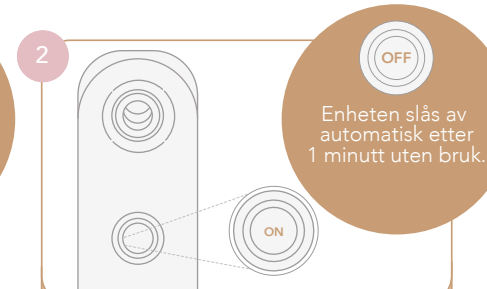


Motiva Flora® Port Locator

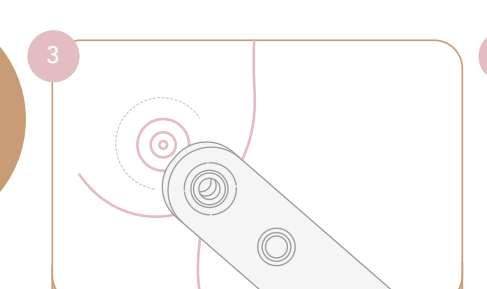
Hurtigveiledning

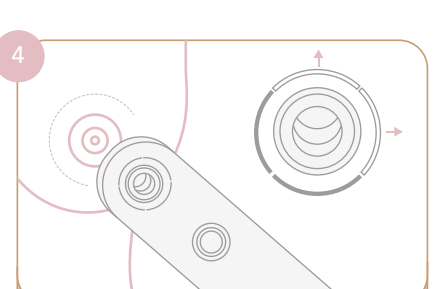
- 

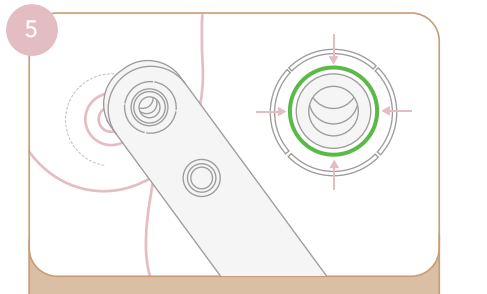
Kontroller utenfor det sterile området at lysene på Motiva Flora Port Locator lyser når den er i nærheten av ekspanderprotesen.

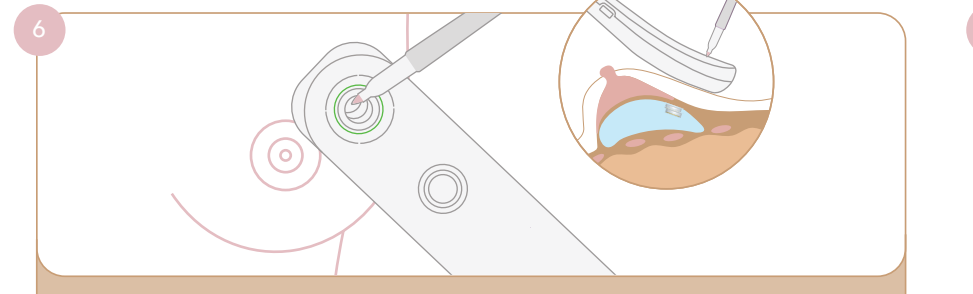
Rengjør og desinfiser enheten med en lofri bomullsklut og isopropylalkohol. Bruk ALDRI slipende produkter eller løsemidler.
- 

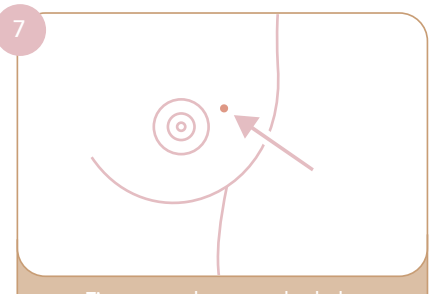
Enheden slås av automatisk etter 1 minutt uten bruk.

Slå på portsøkeren ved å trykke på knappen og slipp den når det hvite ringlyset slås PÅ.
- 

Plasser den øvre delen av enheten nær brystet og beveg den rundt for å lete etter injeksjonsporten.
- 

Hvite lys vil slås på for å finne plasseringen av porten.
- 

Når du har funnet injeksjonsporten, vil en grønn lysring slås på.
- 

Hold enheten stødig, og merk plasseringen av injeksjonsporten gjennom åpningen på enheten med en kirurgisk markør vinkelrett på brysthuden og/eller press enheten godt ned for å gi et midlertidig avtrykk på huden der porten er plassert.
- 

Fjern portsøkeren, og bruk det merkede punktet eller midten av avtrykket på huden som orientering for injeksjonsstedet.

BRUKERGRENSESNIITT
FARGEKODE

