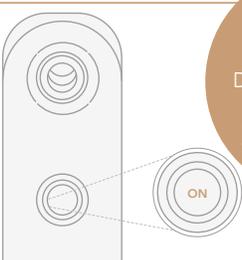


# Motiva Flora® Port Locator

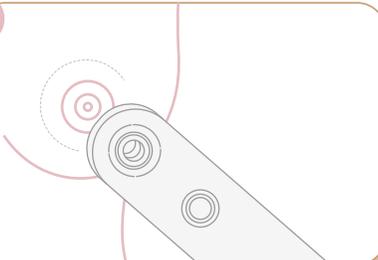
## Kurzanleitung

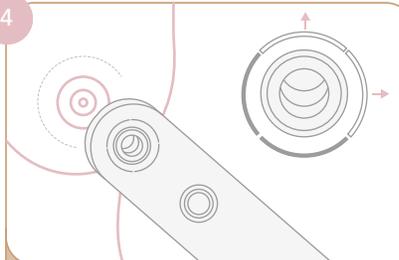
- 

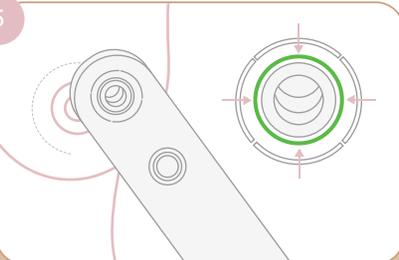
Vergewissern Sie sich außerhalb des sterilen Bereichs, dass die Lichter des Motiva Flora® Port Locators aufleuchten, wenn Sie sich in der Nähe des Brustexpanders befinden.

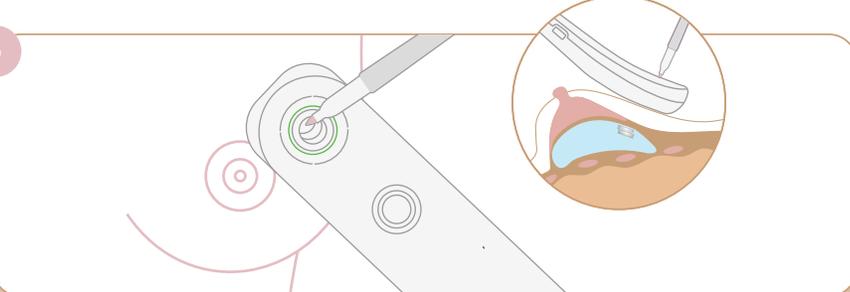
Reinigen und desinfizieren Sie es mit einem fusselfreien Baumwolltuch und Isopropylalkohol. Verwenden Sie NIEMALS Scheuermittel oder Lösungsmittel.
- 

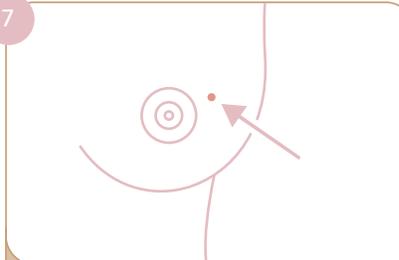
Das Gerät schaltet sich nach 1 Min ohne Benutzung automatisch aus.

Schalten Sie das Port Locator ein, indem Sie die Taste drücken und sie loslassen, sobald der weiße Licht-Ring **EINGESCHALTET** ist.
- 

Positionieren Sie den oberen Teil des Geräts in die Nähe der Brust und bewegen Sie ihn auf der Suche nach der Einspritzöffnung.
- 

Weiße Lichter leuchten auf und zeigen die Position der Öffnung an.
- 

Sobald die Einspritzöffnung gefunden wurde, leuchtet ein grüner Leuchtring auf.
- 

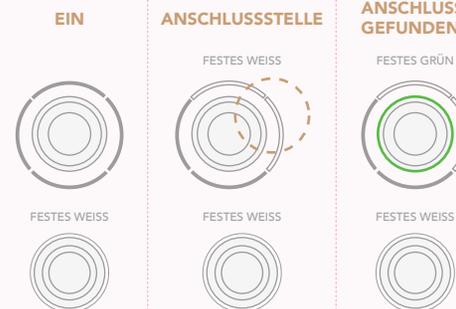
Halten Sie das Gerät ruhig und markieren Sie die Einspritzöffnung anhand des Öffnens des Geräts mit einem chirurgischen Markierer, senkrecht zur Brusthaut und/oder drücken Sie fest auf das Gerät, um eine temporäre Vertiefung auf der Haut zu erzeugen, wo sich die Öffnung befindet.
- 

Entfernen Sie das Port Locator und verwenden Sie den markierten Punkt oder die Mitte der Vertiefung auf der Haut als Nachweis für die Injektionsstelle.

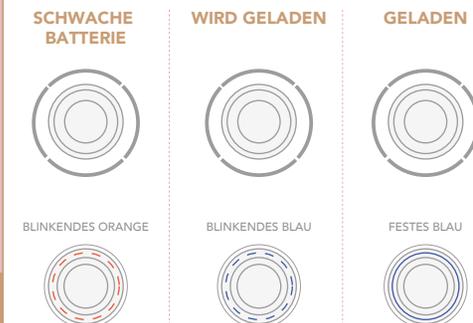
BENUTZERSCHNITTSTELLE  
FARBEN-CODE



### GERÄT EIN & ANSCHLUSSSTELLE



### BATTERIE-STATUS



### RISIKO

