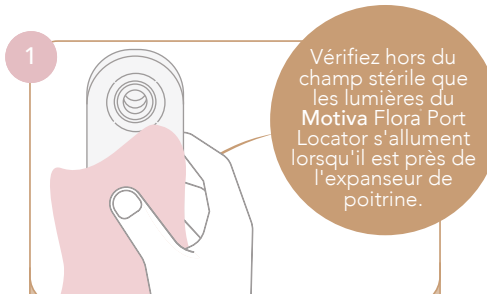
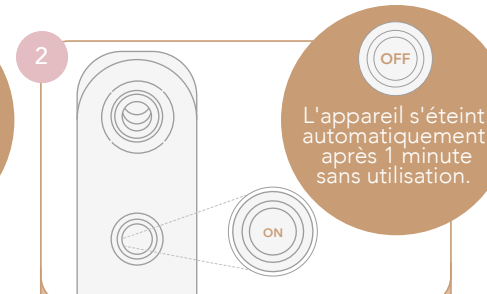


# Motiva Flora® Port Locator

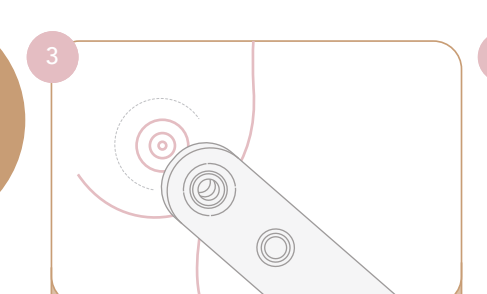
Guide de référence rapide

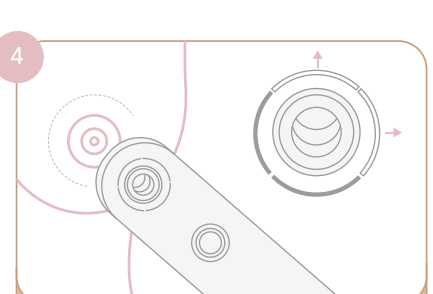
- 

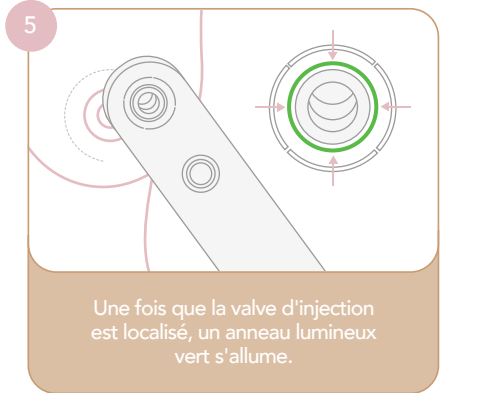
Vérifiez hors du champ stérile que les lumières du Motiva Flora Port Locator s'allument lorsqu'il est près de l'expandeur de poitrine.

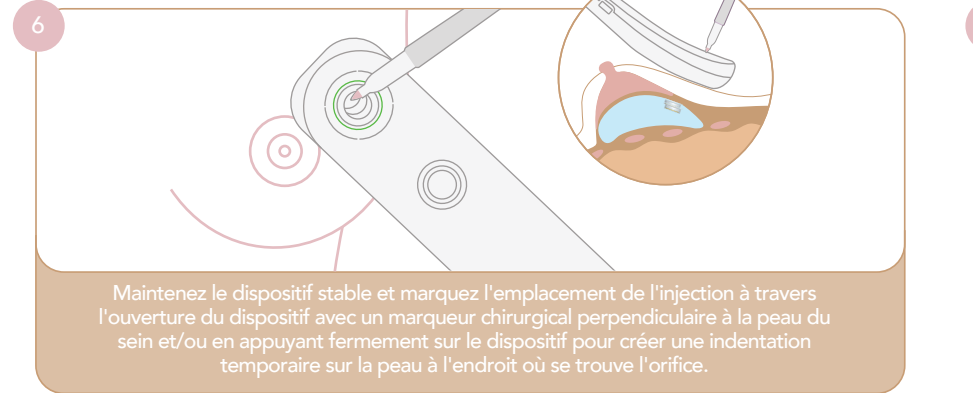
Nettoyez et désinfectez à l'aide d'un chiffon en coton non pelucheux et d'alcool isopropylique. N'utilisez JAMAIS de produits abrasifs ou de solvants.
- 


L'appareil s'éteint automatiquement après 1 minute sans utilisation.

Allumez le Localisateur en appuyant sur le bouton et relâchez une fois l'anneau de lumière blanche activé.
- 

Placez la partie supérieure de l'appareil près du sein et déplacez-le en cherchant la valve d'injection.
- 

Des lumières blanches s'allumeront pour guider l'emplacement de la valve.
- 

Une fois que la valve d'injection est localisée, un anneau lumineux vert s'allume.
- 

Maintenez le dispositif stable et marquez l'emplacement de l'injection à travers l'ouverture du dispositif avec un marqueur chirurgical perpendiculaire à la peau du sein et/ou en appuyant fermement sur le dispositif pour créer une indentation temporaire sur la peau à l'endroit où se trouve l'orifice.
- 

Retirez le localisateur et utilisez le point marqué ou le centre de l'indentation sur la peau comme guide pour le site d'injection.

## INTERFACE UTILISATEUR CODE COULEUR

DISPOSITIF ALLUMÉ & EMPLACEMENT DE LA VALVE			ÉTAT DE LA BATTERIE			RISQUE
<b>ON (allumer)</b>	<b>EMPLACEMENT DE LA VALVE</b>	<b>VALVE LOCALISÉE</b>	<b>BATTERIE FAIBLE</b>	<b>EN CHARGE</b>	<b>CHARGÉ</b>	<b>ALERTE</b>
BLANC FIXE	BLANC FIXE	VERT FIXE	ORANGE CLIGNOTANT	BLEU CLIGNOTANT	BLEU FIXE	ROUGE FIXE
