



Fabricant : MCCB - 32, rue Milford Haven,
10100 Romilly-sur-Seine, France
Distributeur : FARGEOT Cie SAS - Route de Limoges,
24800 Thiviers, France
service-client@podosolution.com

PodoSolution® : PREVENTION ESCARRES **Chaussettes de protection - plante du pied**

Dispositif Médical Classe I

● INDICATIONS

Prévention de l'apparition des escarres.

● COMPOSITION

80% coton, 16% polyester, 1% nylon, 3% élasthanne
Gel polymère, huile minérale de grade pharmaceutique

● MODE D'ACTION

La chaussette est partiellement enduite d'un gel, contenant une huile minérale.

Ce gel :

- Répartit les pressions cutanées,
- Protège des frottements,
- Hydrate la peau

● PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser directement sur une peau lésée ou non protégée.

Ne pas porter plus de 12 heures par jour.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La pointure de la chaussette doit être adaptée à la morphologie du patient.

● CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Porter la chaussette de manière à avoir la surface de gel en contact direct avec la peau. Il est recommandé de vérifier l'absence de lésion ou de signe d'infection cutanée avant le port de la chaussette.

L'utilisation de la chaussette ne remplace pas les soins habituels de la peau et vient en complément des soins quotidiens.

Laver en machine à l'endroit à 30° maximum ou à la main. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.