



**Fabricant :** MCCB – 32, rue Milford Haven,  
10100 Romilly-sur-Seine, France  
**Distributeur :** FARGEOT Cie SAS - Route de Limoges,  
24800 Thiviers, France  
service-client@podosolution.com

## **PodoSolution® : PREVENTION ESCARRES** **Chevillères**

Dispositif Médical Classe I

### **INDICATIONS**

Prévention de l'apparition des escarres.

### **COMPOSITION**

82% polyamide, 16% polyester, 2% élasthanne  
Gel polymère, huile minérale de grade pharmaceutique

### **MODE D'ACTION**

La chevillère est partiellement enduite d'un gel, contenant une huile minérale.

Ce gel :

- Répartit les pressions cutanées,
- Protège des frottements,
- Hydrate la peau

### **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser directement sur une peau lésée ou non protégée.

Ne pas porter plus de 12 heures par jour.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La taille de la chevillère doit être adaptée à la morphologie du patient.

Taille	S	M	L	XL
Tour de cheville	18cm	20cm	22cm	24cm

### **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Porter la chevillère de manière à avoir la surface de gel en contact direct avec la peau. Il est recommandé de vérifier l'absence de lésion ou de signe d'infection cutanée avant le port de la chevillère.

L'utilisation de la chevillère ne remplace pas les soins habituels de la peau et vient en complément des soins quotidiens.

Laver en machine à l'endroit à 30° maximum ou à la main. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.