



**Fabricant :** MCCB - 32, rue Milford Haven,  
10100 Romilly-sur-Seine, France  
**Distributeur :** FARGEOT Cie SAS - Route de Limoges,  
24800 Thiviers, France  
service-client@podosolution.com

## **PodoSolution® : PREVENTION ESCARRES** **Coudières**

Dispositif Médical Classe I

### ● **INDICATIONS**

Prévention de l'apparition des escarres.

### ● **COMPOSITION**

83% coton, 16% polyester, 1% élasthanne  
Gel polymère, huile minérale de grade pharmaceutique

### ● **MODE D'ACTION**

La coudière est partiellement enduite d'un gel, contenant une huile minérale.

Ce gel :

- Répartit les pressions cutanées,
- Protège des frottements,
- Hydrate la peau

### ● **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser directement sur une peau lésée ou non protégée.

Ne pas porter plus de 12 heures par jour.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

### ● **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Porter la coudière de manière à avoir la surface de gel en contact direct avec la peau. Il est recommandé de vérifier l'absence de lésion ou de signe d'infection cutanée avant le port de la coudière.

L'utilisation de la coudière ne remplace pas les soins habituels de la peau et vient en complément des soins quotidiens.

Laver en machine à l'endroit à 30° maximum ou à la main. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.