



NOTICE D'UTILISATION

DAO_D

Chaussure thérapeutique de série à usage prolongé (CHUP)

INDICATIONS

Prévention des plaies, érosions, ulcérations, maux perforants plantaires, douleurs et/ou lésions du pied et des orteils liées à des pathologies neurologiques, vasculaires, métaboliques et orthopédiques avec risque évolutif en termes de douleur, de raideur et de troubles trophiques. Ce produit est indiqué pour les patients diabétiques de type 1 ou 2 présentant des complications neurologiques et/ou vasculaires, y compris avant l'apparition des lésions, en prévention primaire ou secondaire.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : cuir, polyester
- Doublure : polyester
- Première de propreté : mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODENYS)
- Intercalaire souple: éthylène-acétate de vinyle EVA
- Intercalaire rigide : carton renforcé
- Semelle : caoutchouc thermoplastique (TPR)

MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied diabétique :

- Protège le pied vis à vis des éléments extérieurs
- Limite les conflits pied/chaussure tels que les frottements ou l'hyperpression
- Limite la transpiration
- Semelle à profil déroulant pour faciliter la marche, rigidification possible avec l'intercalaire rigide amovible

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter la chaussure pied nu, à utiliser de préférence avec des chaussettes en coton. En cas de lésion cutanée ou de peau à risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Deux intercalaires amovibles sont disponibles avec le modèle DAO_D, un souple et un rigide. L'intercalaire souple situé sous la semelle amovible peut être retiré pour augmenter le volume chaussant, dans ce cas la semelle amovible doit être bien re-positionnée avant d'utiliser la chaussure. L'intercalaire rigide peut être utilisé sur conseil d'un professionnel de santé pour rigidifier la semelle et bénéficier du profil déroulant. Il doit également être positionné sous la semelle amovible à la place de l'intercalaire souple.


Bien ajuster le réglage à l'aide des brides ou des lacets pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer. Vérifier que la languette est bien positionnée.

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée. Laver la semelle intérieure à la main.

Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide, laisser sécher puis appliquer sur le cuir une crème nourrissante avec un chiffon doux.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.

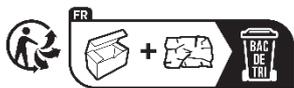

quefairedemesdechets.fr

Dispositif médical de classe I

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Adresse de correspondance :

FARGEOT et cie

391 Route de Gavarnie
Le Petit Gué
24800 Thiviers - France
service-client@podowell.com

Fabricant :

 FARGEOT Cie SAS
46 rue Godard
33200 BORDEAUX-France

Version de la notice : V2 Juin 2025