



NOTICE D'UTILISATION

MELINA_D

Chaussure thérapeutique de série à usage prolongé (CHUP)

INDICATIONS

Prévention des plaies, érosions, ulcérations, maux perforants plantaires, douleurs et/ou lésions du pied et des orteils liées à des pathologies neurologiques, vasculaires, métaboliques et orthopédiques avec risque évolutif en termes de douleur, de raideur et de troubles trophiques. Ce produit est indiqué pour les patients diabétiques de type 1 ou 2 présentant des complications neurologiques et/ou vasculaires, y compris avant l'apparition des lésions, en prévention primaire ou secondaire.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : polyester, cuir
- Doublure : polyester
- Première de propreté : mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODONA)
- Intercalaire : éthylène-acétate de vinyle EVA
- Semelle : polyuréthane

MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied diabétique:

- Volume chaussant extra-large et grande ouverture sur le dessus
- Limite les conflits pied/chaussure tels que les frottements ou l'hyperpression grâce aux mousses de protection, la doublure sans couture et à l'avant en matériau extensible
- Limite la transpiration grâce à des matériaux respirants

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter la chaussure pied nu, à utiliser de préférence avec des chaussettes en coton. En cas de lésion cutanée ou de peau à risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

L'intercalaire situé sous la semelle intérieure amovible peut être retiré pour augmenter le volume chaussant, dans ce cas la semelle amovible doit être bien positionnée avant d'utiliser la chaussure.

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer. Vérifier que la languette est bien positionnée.

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée. Laver la semelle intérieure à la main.

Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide, puis laisser sécher.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.



Dispositif médical de classe I

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Adresse de correspondance :

FARGEOT et cie

391 Route de Gavarnie
Le Petit Gué
24800 Thiviers - France
service-client@podowell.com

Fabricant :

 FARGEOT Cie SAS
46 rue Godard
33200 BORDEAUX-France

Version de la notice : V2 Juin 2025