



NOTICE D'UTILISATION

ALARIC

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied : œdème, inflammation et rhumatismes, orteils en griffe ou en marteau, métatarsalgie, névrome de Morton.
Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : cuir
- Doublure : laine, polyuréthane, polyamide
- Semelle : caoutchouc thermoplastique TR
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOMED)

MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra-large
- Réglage précis et facile, par des lacets et une fermeture à glissière, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, oedématié ou revêtu de pansements
- Grand volume à l'avant du pied pour protéger les pieds fragiles

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter la chaussure pied nu. En cas de lésion cutanée ou de peau à risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure. En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer. Vérifier que la languette est bien positionnée. Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.


Laver la semelle intérieure à la main.

Il est conseillé d'imperméabiliser le produit avant de le porter. Nettoyer d'abord à sec avec une brosse et ensuite avec une éponge humide puis laisser sécher.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, le cuir utilisé peut présenter de légères différences d'aspect qui ne doivent pas être considérées comme des défauts.

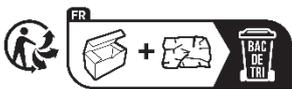

quefairedemesdechets.fr

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE :

Vous avez acheté une paire de chaussures **ALARIC**, nous aimerions savoir si vous en êtes satisfait. Vos remarques nous sont utiles pour améliorer nos produits.

Vous pouvez nous en faire part en tapant ce lien dans votre navigateur de recherche :

<https://fr.surveymonkey.com/r/qr-alaric>

ou en scannant directement ce QR Code avec l'appareil photo de votre téléphone portable.



Dispositif médical de classe I

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Fabricant :



Route de Limoges
24800 Thiviers- France
service-client@podowell.com

Version de la notice : V1 Mai 2023