



**FARGEOT CIE SAS**

Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

[service-client@podowell.com](mailto:service-client@podowell.com)

## **NOTICE : DAMIA**

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)  
Dispositif Médical Classe I 

### ● **INDICATIONS**

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

### ● **COMPOSITION**

- Dessus en cuir de bovin
- Doublure en microfibre de polyester ON STEAM®
- Semelle en polyuréthane
- Semelle intérieure amovible, dessus en croûte de cuir

### ● **MODE D'ACTION**

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant large, ouverture totale
- Réglage facile, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou oedématisé
- Zone extensible au niveau de l'hallux valgus limitant les frottements et l'hyperpression

### ● **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS**

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La peinture doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

### ● **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur.

Nettoyer à l'aide d'une éponge humide, laisser sécher puis appliquer sur le cuir une crème nourrissante avec un chiffon doux.

### ● **GARANTIE**

Le cuir est un produit vivant, il est impossible de garantir un aspect homogène malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit.