



## NOTICE D'UTILISATION

### GEORGETTE

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

#### INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied : inflammation et rhumatismes, hallux valgus, quintus varus, fasciite plantaire, névrome de Morton, métatarsalgie.  
Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

#### COMPOSITION

- Dessus : polyuréthane, polyamide et polyester
- Doublure : microfibre de polyester
- Semelle : polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de polyester (référence PODOGABSUEDE\_1)

#### MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied:

- Volume chaussant large, ouverture totale sur le dessus
- Réglage facile, par deux bandes auto-agrippantes, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire
- Zone réglable et extensible au niveau de l'hallux valgus limitant les frottements et l'hyperpression

#### PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

#### CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer.

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver la semelle intérieure à la main.

Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide, puis laisser sécher.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.



Dispositif médical de classe I 

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

#### Adresse de correspondance :

##### PODOWELL

544 avenue Jean-Baptiste Godin  
33240 Saint André de Cubzac - France  
service-client@podowell.com

#### Fabricant :



46 rue Godard  
33200 BORDEAUX-France

Version de la notice : V3 Déc. 2025