



NOTICE D'UTILISATION

GETASOLO

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

INDICATIONS

Phase post-opératoire après chirurgie de l'avant pied et plus particulièrement de l'hallux valgus (protocole Scarf ou Chevron)
Œdème et plaie de l'avant-pied, fracture stable du métatarse et des orteils, maux perforants plantaires.
Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : polyester, polyuréthane
- Semelle intérieure : éthylène-acétate de vinyle (EVA)
- Semelle : caoutchouc thermoplastique (TPR),

MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied opéré :

- Volume chaussant extra-large
- Ouverture totale sur le dessus
- Réglage facile et ajustable par trois bandes auto-agrippantes, permettant des variations de volume pour s'adapter à un pied inflammatoire, œdématié ou pansé
- Semelle avec un profil réduisant la pression à l'avant du pied et maintenant le poids en arrière des articulations métatarsiennes
- Semelle à bout carré et large surface de contact avec le sol pour une meilleure stabilité
- Première amovible

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Convient indifféremment au pied gauche et au pied droit.

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer.

Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide pour laisser sécher.

Ne pas exposer la chaussure à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker la chaussure dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.



Dispositif médical de classe I **CE**

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Adresse de correspondance :

FARGEOT et cie

391 Route de Gavarnie
Le Petit Gué
24800 Thiviers - France
service-client@podowell.com

Fabricant :

 FARGEOT Cie SAS
46 rue Godard
33200 BORDEAUX-France

Version de la notice : V2 Juin 2025