



NOTICE D'UTILISATION

NELIA_02

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied : œdèmes, inflammation et rhumatismes, hallux valgus, quintus varus, orteils en griffe ou en marteau.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : polyester
- Doublure : polyester
- Semelle en polychlorure de vinyle (PVC)
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODONELLY)

MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant large
- Zone extensible sur l'avant du pied permettant de s'adapter à la morphologie et aux déformations des orteils
- Enfilage facile grâce au cou-de-pied dégagé et élastiqué, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou œdématié.

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver la semelle intérieure à la main.

Laver la chaussure à la main ou en machine à 30°C maximum, sans essorage ou avec un essorage doux.

Si la chaussure n'est pas bien rincée, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.

Laisser sécher à l'air libre après avoir remis l'embauchoir pour éviter la déformation de la chaussure.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.



quefairedemesdechets.fr

Dispositif médical de classe I **CE**

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Adresse de correspondance :

PODOWELL

544 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint André de Cubzac - France
service-client@podowell.com

Fabricant :



46 rue Godard
33200 BORDEAUX-France

Version de la notice : V2 Déc. 2025