



# NOTICE D'UTILISATION

## PLUMETTE

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

### INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied : inflammation et rhumatismes, œdème, métatarsalgie.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

### COMPOSITION

- Dessus : polyester,
- Doublure : polyester
- Semelle : polychlorure de vinyle (PVC)
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOFIRST)

### MODE D'ACTION

Chausson adapté à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant normal, grande ouverture
- Réglage facile par une bande auto-agrippante permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou œdématié

### PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

### CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer. Vérifier que la languette est bien positionnée. Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver la semelle intérieure à la main.

Nettoyer le chausson à l'aide d'une éponge humide, puis laisser sécher.

Ne pas exposer les chaussons à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussons dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.

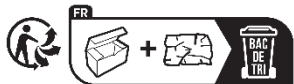

quefairedemesdechets.fr

### VOTRE AVIS NOUS INTERESSE :

Vous avez acheté une paire de chaussures **PLUMETTE**, nous aimerions savoir si vous en êtes satisfait. Vos remarques nous sont utiles pour améliorer nos produits.

Vous pouvez nous en faire part en tapant ce lien dans votre navigateur de recherche :

<https://fr.surveymonkey.com/r/plumette>

ou en scannant directement ce QR Code avec l'appareil photo de votre téléphone portable.



Dispositif médical de classe 1

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Fabricant :

FARGEOT Cie SAS

Route de Limoges

24800 Thiviers- France

service-client@podowell.com

Version de la notice : VI Mai 2023