



FARGEOT CIE SAS

Route de Limoges - 24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

NOTICE : VALENTINE

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)
Dispositif Médical Classe I 

INDICATIONS

Pathologies temporaires ou réversibles du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied en raison d'une inflammation, d'un œdème ou d'une lésion.

Se conformer à la prescription et aux recommandations du médecin.

COMPOSITION

- Dessus en textile (polyester, coton et élasthanne)
- Doublure en microfibre de polyester ON STEAM®
- Semelle en polyuréthane
- Semelle amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester

MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant extra-large
- Réglage facile, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire ou oedématisé
- Zone extensible au niveau de l'avant-pied limitant les frottements et l'hyperpression

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Ce produit doit être délivré par un personnel de santé habilité.

La peinture doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur.

Nettoyer à l'aide d'une éponge humide puis laisser sécher.