



NOTICE D'UTILISATION

VALMON

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied ; inflammation et rhumatismes, œdèmes, hallux valgus.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : polyuréthane, polyester
- Doublure : polyester
- Semelle : caoutchouc
- Semelle intérieure : polyuréthane, coton

MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied:

- Volume chaussant large, ouverture totale sur le dessus
- Réglage facile par trois bandes auto-agrippantes permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, oedématisé ou revêtu de pansements

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer.

Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide, puis laisser sécher.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.



quefairedemesdechets.fr

Dispositif médical de classe I **CE**

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Adresse de correspondance :

FARGEOT et cie

391 Route de Gavarnie

Le Petit Gué

24800 Thiviers - France

service-client@podowell.com

Fabricant :



FARGEOT Cie SAS

46 rue Godard

33200 BORDEAUX-France

Version de la notice : V2 Déc. 2025