



NOTICE D'UTILISATION

YANNICK

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

INDICATIONS

Pathologies neuromusculaires évoluées, comme le pied tombant (ou drop foot), la paralysie du nerf fibulaire, l'atrophie musculaire ou des lésions cérébrales, qui affectent la capacité à lever ou à contrôler le pied correctement lors de la marche et pour lesquelles le port d'un releveur de pied est nécessaire.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : polyuréthane, polyamide, cuir
- Doublure : polyester
- Semelle intérieure amovible en mousse caoutchouc de styrène butadiène SBR, recouverte de microfibre de polyester (référence PODOSOFT)
- Intercalaire : éthylène-acétate de vinyle EVA
- Semelle : caoutchouc

MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied porteur d'un releveur (rigide ou souple) :

- Large ouverture pour accueillir facilement le pied équipé du releveur
- 3 brides auto-agrippantes pour un réglage modulable et précis
- Contrefort très emboitant et renforcé pour le maintien latéral du pied, et thermoformable pour s'adapter à un releveur rigide
- Plusieurs passants pour fixer le crochet d'un releveur souple
- Adaptation du volume chaussant grâce à l'intercalaire amovible

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter la chaussure pied nu. En cas de lésion cutanée ou de peau à risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer. Vérifier que la languette est bien positionnée. Utiliser l'intercalaire amovible, à positionner sous la semelle intérieure amovible, si nécessaire pour ajuster le volume chaussant. L'intercalaire peut également être utilisé pour compenser l'épaisseur d'un releveur rigide dans la chaussure du pied non appareillé.


Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée.

Laver la semelle intérieure à la main.

Nettoyer la chaussure à l'aide d'une éponge humide puis laisser sécher.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.

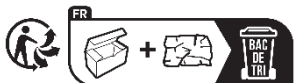

quefairedemesdechets.fr

Dispositif médical de classe 1 **CE**

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Adresse de correspondance :

FARGEOT et cie

391 Route de Gavarnie
Le Petit Gué
24800 Thiviers - France
service-client@podowell.com

Fabricant :



FARGEOT Cie SAS
46 rue Godard
33200 BORDEAUX-France

Version de la notice : V2 Juin 2025