

CANNASEN® Pain & Arthritis Gel

SE: CANNASEN® Pain & Arthritis Gel Bruksanvisningen

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du applicerar CANNASEN® Pain & Arthritis Gel

CANNASEN® Pain & Arthritis Gel är en registrerad medicintekniska produkt. Effekt och säkerhet har testats enligt direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

VAD ÄR CANNASEN® PAIN & ARTHRITIS GEL?

CANNASEN® Pain & Arthritis Gel är en topisk gel som bidrar till att minska smärta och svullnad i leder. Gelen har en kylande effekt som lindrar den „heta“ eller varma känslan och smärtan i lederna.

HUR FUNGERAR CANNASEN® PAIN & ARTHRITIS GEL?

När gelen appliceras på huden avdunstar alkohol- /vattenblandningen snabbt, vilket ger en konduktiv kylande och smärtlindrande effekt.

AVSEDD ANVÄNDNING

Lindra smärta och svullnad i lederna.

FÖRDELAR VID ANVÄNDNING

Smärtlindring, minskning av svullnad, kylande effekt.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Applicera utvändigt på berörda områden på kroppen, såsom fingrar, handleder, armbågar, axlar, nacke, rygg, knän och vristar.

DOSERINGSANVISNINGAR OCH VARAKTIGHET FÖR APPLICERINGEN

Rekommenderad dosering: Applicera 0,25 g (storleken på en ärt) på handen, handleden eller armbågen, eller 0,5 g (storleken på 2 ärtor) på foten, tofleden eller knäet.

Användningsfrekvens och varaktighet för appliceringen: Gelen kan användas flera gånger om dagen. Produkten är avsedd för tillfällig användning.

INNEHÅLL

Aktiva ingredienser: Alkohol- och Vattenblandning. **Övriga beståndsdelar:** Mentol, Natriumhydroxidlösning, Cannabidiol (CBD), Akrylat Crosspolymer, Isopropylmyristat, Kamfer, Fytinsyra. Utan konserveringsmedel och färgämnen.

DOSERINGSFORM OCH INNEHÅLL

Originalförpackning med 50 ml gel.

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Undvik kontakt med ögon och näslemhinnor. Ta inte gelen oralt.
- Förvaras utom räckhåll för små barn och husdjur.
- Rekommenderas inte för barn under 14 år utan att ha rådfrågat läkare.
- Använd endast under graviditet eller amning efter att ha rådfrågat läkare.
- Applicera inte produkten på skadad eller irriterad hud.
- Tvätta händerna noggrant efter användning.
- Kontakta läkare vid eventuell försämning.

INTERAKTIONER

Använd inte produkten på huden samtidigt som andra topiska produkter. För att undvika läkemedelsinteraktioner ska du använda andra läkemedel med två timmas mellanrum eller rådfråga din läkare.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid överkänslighet (allergi) mot någon av ingredienserna.

FÖRVARING

Förvaras svalt (mellan 10 °C och 25 °C) och skyddat från ljus.

ANMÄRKNINGAR OCH INFORMATION OM DEN MEDICINTEKNISKA PRODUKTENS HÅLLBARHET

Gelen får endast användas fram till utgångsdatum, inte efter. Öppnad förpackning ska användas inom 90 dagar och sedan kasseras. Mindre färgförändringar har ingen inverkan på produktens effektivitet.

AVFALLSHANTERING

Produkten kan kastas bland hushållsoporna.

RAPPORTERING AV INCIDENTER

Om en allvarlig incident inträffar i samband med denna produkt (patient, användare eller annan person avlider, tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd, allvarlig risk för folkhälsan), måste denna incident rapporteras till tillverkaren och nationella behöriga myndigheter.

ALLMÄN INFORMATION

CANNASEN® Pain & Arthritis Gel är en lättanvänd produkt som har en behaglig kylande och lindrande effekt på smärtande, varma och svullna leder.

