


# VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING

## ESRI 500 Easy Smart

Matrasvervangend systeem



### CONTROL UNIT

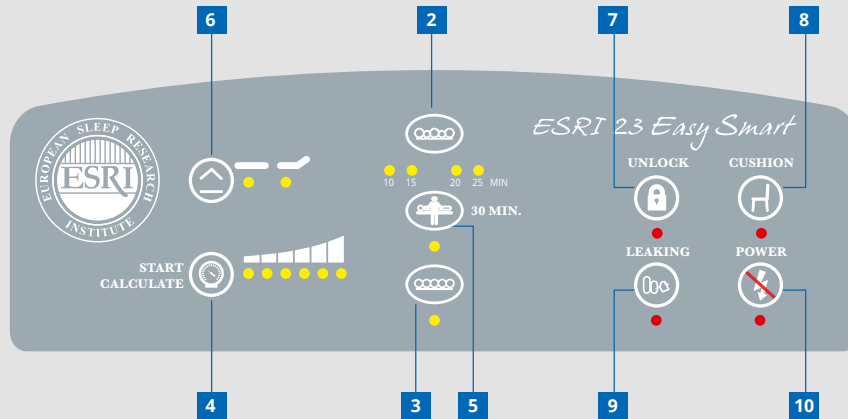

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1 Aan/uit-schakelaar      | 6 Zit/ligpositie       |
| 2 Alternerende/cyclustijd | 7 Ontgrendelen         |
| 3 Statisch                | 8 Zitkussen-stand      |
| 4 Gewichtsberekening      | 9 Lekkage-alarm        |
| 5 Verpleegstand           | 10 Stroomstoringsalarm |

### MATRAS AANSLUITEN OP DE CONTROL UNIT



Sluit de luchtslangen en de sensor aan met behulp van de snelkoppeling aan de bedienings-eenheid. Zorg ervoor dat de luchtslangen niet knikken tussen de matras, het bedframe en de pompeenheid.



Activeer CPR aan het hoofdgedeelte (zijde van de slangenset) door draaiknop richting 'CPR' te draaien.

**ESRI** UW PARTNER IN ZORG

ESRI B.V. Evenementenlaan 8 | 3001 Heverlee  
T +32 (0)16 89 81 91 | E info@esri.be | www.esri.be

# VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING

## ESRI 500 Easy Smart

Matrasvervangend systeem



### THERAPIE STANDEN



#### Alternating Pressure Therapy

- Druk op deze knop om de luchtmatras in te stellen op de alternerende modus.
- Druk op dezelfde knop om de cyclustijd te selecteren.
- De opties voor de cyclustijd zijn: 10 (standaard), 15, 20 of 25 minuten.



#### Verpleegstand

- Druk op deze knop om de matras maximaal te laten opblazen (statisch). Dit vergemakkelijkt de verpleging en verzorging van de zorgvrager.
- De pomp schakelt na 30 minuten automatisch terug naar de vorige modus.



#### Constant Low Pressure

- Druk op deze knop om de luchtmatras in te stellen op de statische modus. Deze stand houdt de matras continu op de geselecteerde druk.



#### Zit/licgpositie (positiesensor)

- Wanneer de sensor in de matras detecteert dat het hoofdeinde omhoog wordt gezet, schakelt de pomp automatisch naar de zitstand door de drukwaarde te verhogen. Dit vergemakkelijkt het zitten.
- Als de zitsensor losgekoppeld of defect is, druk dan op de knop om naar de zitmodus te schakelen.



#### Ontgrendelen

- Druk op deze knop om het paneel te vergrendelen of te ontgrendelen.
- Auto: het paneel wordt automatisch vergrendeld als dit 5 minuten niet bediend is.
- Handmatig: druk de vergrendelknop gedurende 2 seconden in om het paneel te vergrendelen, druk deze nogmaals gedurende 2 seconden in om het paneel te ontgrendelen.



#### Selecteer het drukniveau

- De pomp stelt automatisch het optimale drukniveau in naargelang het gewicht, morfologie en positie van de gebruiker.
- Het comfortniveau kan manueel worden aangepast afhankelijk van de noden van de zorgvrager. Druk hiervoor 3 seconden op deze knop.
- Druk 1x kort op deze knop om het drukniveau te resetten.