

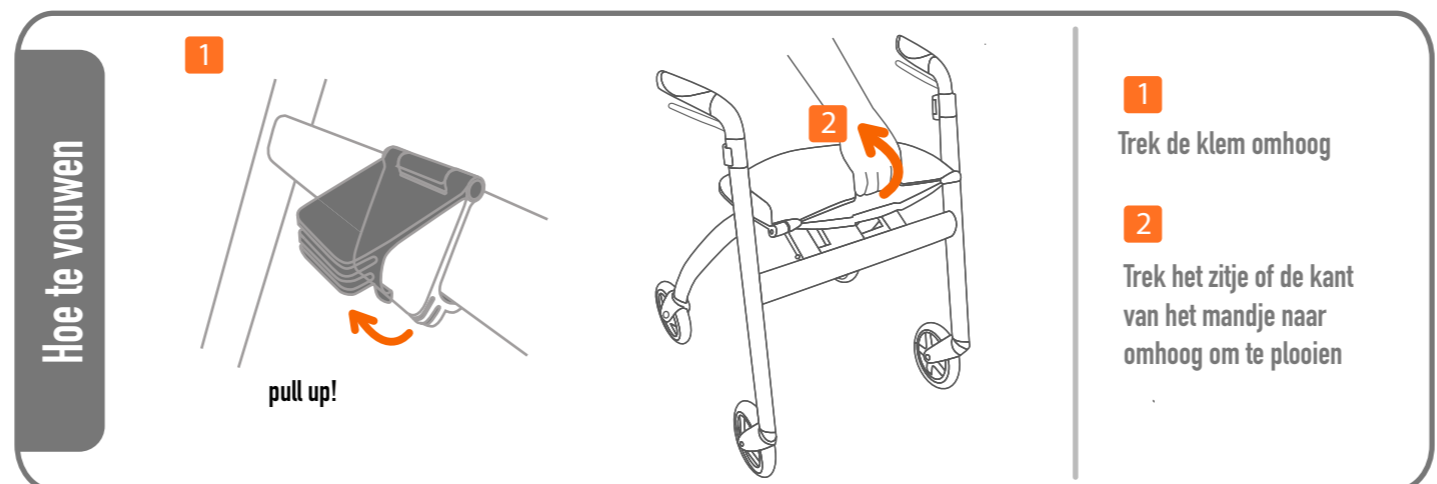
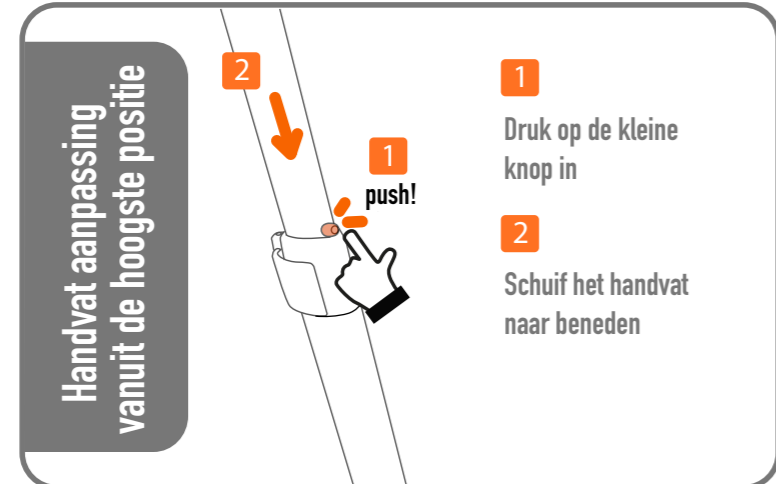
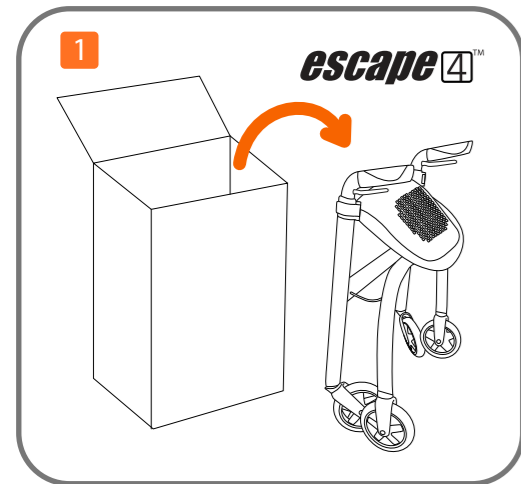
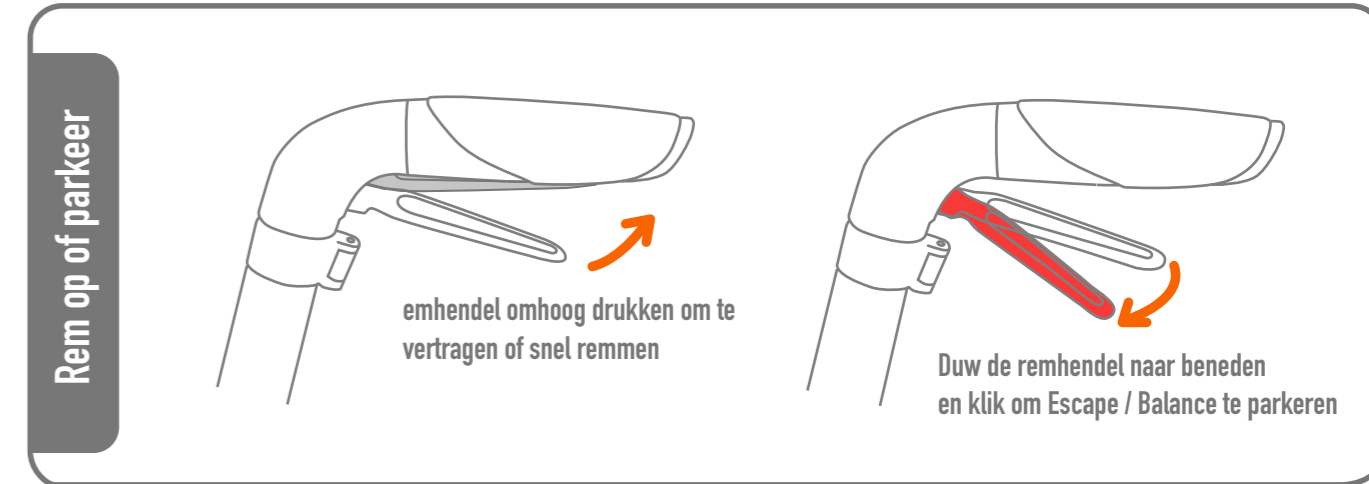


2 rol de voorwielen naar voren om het frame uit te vouwen

3 druk de klem (onder de stoel / mand) naar beneden om te vergrendelen met frame


⚠️ Zorg ervoor dat de nip-glide volledig open en vastgezet is voor gebruik

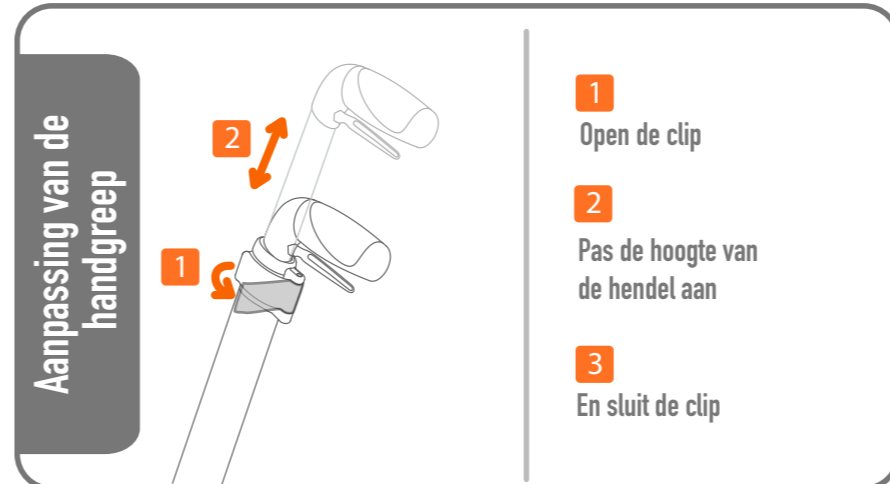

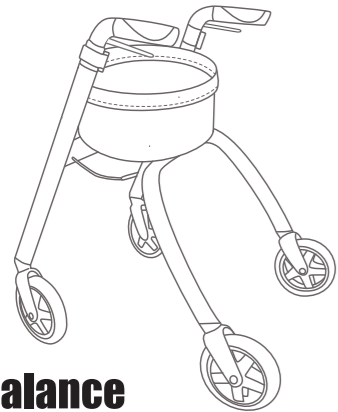

balance


MUST HAVE

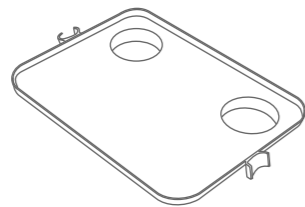

butler (food tray)
- verkoop afzonderlijk



cozy (cushion)
- verkoop afzonderlijk

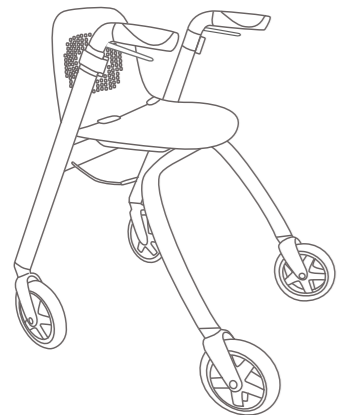

escape 
or **balance** with seat



tuck (shopping bag)
- verkoop afzonderlijk



balance™

Poids maximum de l'utilisateur 100kg / 220lbs
hauteur de la poignée 75-90 cm / 29.5-35.5 "

La hauteur recommandée de l'utilisateur est de 150-180 cm / 4,9-5,9 pieds
La distance de braquage maximale est de 85cm /33,5" po de diamètre



escape [™]

Maximaal gebruikersgewicht 100 kg / 220 lbs
handvat hoogte 75-90cm / 29.5-35.5"

De aanbevolen lengte van de gebruiker is 150~180 cm / 4,9~5.9 ft
De maximale draaiafstand is 85 cm / 33,5 "diameter



Waarschuwing

Gebruik nip-glide niet voor andere doeleinden, zoals een rolstoel / kinderwagen, dan als loophulpmiddel.
Hang niets aan glijdende handgrepen of frame.

Gebruik de stoel niet zonder de rugleuning.

Het wordt aanbevolen om uw arts, fysiotherapeut of OT te raadplegen over uw geschiktheid
om de nip-glide correct te bedienen.

MAX. Belasting voor TUCK (BAG) is 5 kg (wanneer deze achter in de stoel wordt geplaatst - rugtasstijl)
Als het het maximale gewicht overschrijdt, kan dit u in gevaar brengen bij het gebruik van nip-glide.



Onderhoude

VControleer regelmatig of de schroeven (zitvlak) goed zijn vastgedraaid.

Zorg ervoor dat uw rem goed werkt. Neem bij tekenen van remslijtage contact op met het servicecentrum.

Houd wielen schoon en vervang wielen als ze versleten of beschadigd zijn

Onderhoudsinstructie voor plooiën en gezellig

Vuil afborstelen / Handwas in warm water alleen / Goed afspoelen / Niet drogen in droogtrommel

/ Niet strijken / Niet bleken/ Niet chemisch reinigen / In de schaduw van direct zonlicht drogen

/ Geen wasmiddelen gebruiken



nip-glide

balance™ | **escape** [™]

instructie

Lees deze instructie vóór gebruik voor uw veiligheid