



Een achterwiel hondenrolstoel wordt gebruikt bij verlamming, bij Degeneratieve myelopathie, na een hernia... kortom bij alle problemen van de achterpoten kan een hondenrolstoel worden gebruikt.

Zo kan een hond een verlamming hebben waardoor de hond de achterpoten niet meer actief kan gebruiken.

Maar ook problemen met wandelen door artrose, knieaandoeningen, heupaandoeningen kunnen met een hondenrolstoel verholpen worden.



Voordeel van een maatwerk hondenrolstoel

Garantie

Bij normaal gebruik is er een jarenlange garantie op defecten, Eddies Wheels garandeert dat de hondenrolstoel één hondenleven meegaat. Per hondenras, en geslacht, wordt er gebruik gemaakt van een zadel om de hond op te steun te geven op het bekken. Hierdoor past het zadel van de hondenrolstoel perfect.

Ook zijn de rolstoelen geschikt om in water te gebruiken. Ga je naar zee met de rolstoel? Zorg dan dat je na deze activiteit de rolstoel zeer goed afspoelt want zowel het zout(water) als het fijne zeezand kan voor extra slijtage zorgen.

Anatomische en biomechanische uitlijning

De hondenrolstoel heeft zijn evenwichtspunt op de wielen, waardoor de hondenrolstoel niet naar achter of voren helt bij gebruik. Dit is heel belangrijk voor de hondenrug, de hondenrug blijft zo stabiel. Hierdoor gaan er geen problemen ontstaan aan de rug door het (langdurig) gebruik van de hondenrolstoel.



De hondenrolstoel kan worden aangepast als het ziektebeeld verder achteruit gaat, dus bv je start met een hondenrolstoel met twee wielen achteraan maar deze kan ook omgebouwd worden tot een vierwielige meer stabiele hondenrolstoel als je hond hier aan toe is.

Gebruik van verschillende assen

Bij Eddies Wheels kunnen we kiezen tussen drie verschillende assen voor de wielophanging. Met name een standaard as, neutrale as of variabele as kunnen gekozen worden.

Standaard as voor het wiel

Dit is de gewone as waarbij het wiel op het frame wordt gezet. Deze as is net achter het heupgewricht gelegen.

Neutrale as voor het wiel

Deze as staat ter hoogte van het heupgewricht hierdoor gaat de hondenrolstoel het gewicht van de hond optimaal verdelen over de achterwielen en de voorpoten.

Variabele as voor het wiel

Deze heeft mijn grootste voorkeur omdat we met deze as het wiel optimaal kunnen positioneren ten op zichte van het heupgewricht. Deze as kan er ook voor zorgen dat er op termijn bijvoorbeeld voorwielen kunnen worden gemonteerd op de hondenrolstoel. Zeker bij achteruitgaande ziektebeelden kan dit een meerwaarde bieden.

Gebruikte materialen

Deze hondenrolstoel wordt uit licht en stevig materiaal gemaakt. Doordat de hondenrolstoel op maat wordt gemaakt zijn er bijna geen losse delen waardoor de rolwagen stabiel is bij aflevering en blijft na gebruik.

Het enige waar jezelf voor moet zorgen is dat de vijsjes worden aangedraaid om de stabiliteit niet verloren te laten gaan.



Training met een achterwiel hondenrolstoel

Het aanleren van het gebruik van een achterwiel hondenrolstoel is, afhankelijk van het ziektebeeld, niet zo heel moeilijk.

Zeker honden die een verlamming hebben aan beide achterpoten kunnen zeer snel wennen aan hun betere mobiliteit in de hondenrolstoel.

Als jouw hond zijn beide achterpoten nog wel (gedeeltelijk) gebruikt, kan het soms moeilijker zijn om dit aan te leren. Dan gaan we variëren in hoogte zodat jouw hond wel zijn achterpoten nog actief kan gebruiken. Zo gaan door de beweging de spieren achteraan ook actief blijven. Doordat jouw hond actiever blijft, treedt er minder spieratrofie op.

Een hond in een rolstoel mag je zeker niet vergelijken met een mens in een rolstoel. De hond blijft actief tijdens het gebruik, een mens zit in de rolstoel. Dus eigenlijk is een rolstoel voor een hond te vergelijken met een rollator (voor ouderen) of loopwagentje (voor kinderen).

Aflevering van een maatwerk hondenrolstoel

Tijdens de aflevering doen we (in de mate van het mogelijke) ook de rolstoel aan bij jouw hond. Dan kan jouw hond hier al rustig aan aan wennen. En dan doen we een laatste check en stellen we maten indien nodig nog verder in voor jouw hond. Op deze manier ben je ook zeker van een goed passende (anatomisch en biomechanisch correct) en degelijke rolwagen voor de rest van het leven van je hond.



Sinds 2018 is Pro4Paws hoofdverdelers geworden van [Eddie's Wheels](#) voor België en Nederland. Dit is voor ons een duidelijke erkenning van de kennis die we hebben voor het opmeten, afleveren en aanpassen van de hondenrolstoelen van Eddie's Wheels.

Eddie, Leslie en Chris hebben al jarenlang ervaring met vervaardigen van hondenrolstoelen voor honden.

Meer info: www.pro4paws.com