



Een help'em up dog harness is er om je hond te assisteren bij het rechtstaan. Dit tuig bestaat uit twee delen: een deel omvat de schouders van de hond, het andere deel omvat de heupen van de hond. Zo kan je jouw hond optimaal ondersteunen tijdens de revalidatie.

Gebruik van de Help'em up dog harness

1. bij het opstaan bij artrose
2. na operatie
3. tijdens revalidatie
4. bij het assisteren om in- en uit de auto te springen
5. tijdens zwemmen en/of hydrotherapie
6. bij het opstaan bij heupproblemen

Kan ook als harnas gebruikt worden bij een amputatie van een voor- of achterpoot. Door de anatomische vormgeving blijft de help em up dog harness mooi op zijn plaats zitten.

Kan ook als de gebruikt worden bij een amputatie van een voor- of achterpoot. Door de anatomische vormgeving blijft de help em up dog harness mooi op zijn plaats zitten.



Materialen van de Help'em up dog harness

Aan beide delen zijn een handvat bevestigd, dit is bij grotere honden verstevigd. Hierdoor krijg je een goede vating op het gehele lichaam van de hond.

De Help'em up is gemaakt uit neopreen en is hierdoor ook geschikt voor gebruik in water. Hierdoor kan jouw hond ermee zwemmen en/of hydrotherapie doen.

Bij het tuigje kan je ook nog een (verstevigde) leiband bestellen waardoor je je hond nog extra kan ondersteunen tijdens het wandelen.



Onderdelen van een Help'em up dog harness (maat X-small)

1. Een gewone metalen ring om de hond eventueel aan te lijnen
2. Een handvat aan de schouders en een handvat aan de heupen
3. Neopreen polstering voor extra comfort
4. Sluitingen met gespen, om snel aan- en uit te doen
5. Gesp om heupgedeelte los te maken, hierdoor kan het borstgedeelte apart gebruikt worden
6. Alle banden zijn aanpasbaar in grootte



Help'em up dog harness versus het gebruik van een handdoek

<p>Gebruik van een handdoek, doek of sjaal</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rug wordt gekromd2. Druk op ingewanden3. Teveel belasting voorpoten	
<p>Gebruik van Help'em up dog harness</p> <ol style="list-style-type: none">1. De rug van jouw hond wordt mooi recht gehouden2. De belasting zit op de harde botstructuren3. De voorpoten worden mee ontlast	



Een help'em up dog harness aankopen?

Dat kan via de webshop. Via de maattabel selecteer je het juiste gewicht van jouw hond. Dit help'em up dog harness is verkrijgbaar in 5 maten. Van X-small voor de allerkleinste honden rassen tot een X-large voor de allergrootste rassen.

Twijfel je aan de maat? Wil je liever langskomen om te passen en aan te laten passen, maak dan zeker een afspraak.

Soms is een help'em up dog harness niet voldoende om jouw hond voldoende steun te geven tijdens de revalidatie. Kijk dan ook zeker naar de pagina van de hondenrolstoel. Je kan steeds een hondenrolstoel huren voor een (revalidatie)periode.

Meer info: www.pro4paws.com