



Huur hondenrolstoel

Normaal wordt de huur hondenrolstoel volledig op de juiste maat afgesteld. Twijfel je thuis toch aan de juiste afstellingen, stuur dan een foto door van jouw hond in de rolstoel zoals de foto:




1. Harnas: fitting, aansluitend maar nooit te vast, zoals je een halsband zou aandoen
 - a. Blauw lint bovenaan
 - b. Zwart lint vooraan
 - c. Rood lint (met gesp) onderaan
2. Knop vastzetten





Huur hondenrolstoel

3. Vastzetten heupen

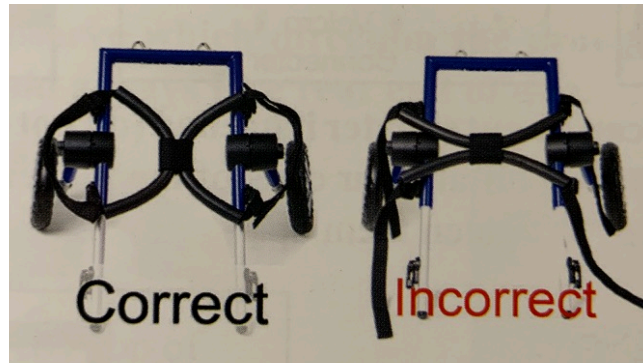

4. Verbreden of versmallen

Je kan het **frame verbreden/versmallen** indien nodig.
Tussen jouw hond en het frame zou ongeveer 3 tot 5 cm moeten zijn.





5. Verhogen of verlagen

Je kan het **frame verhogen/verlagen** indien nodig.



Bar moet evenwijdig (of toch bijna evenwijdig) met de grond staan

6. Verlengen of verkorten

Lengte bar, net voorbij schoudergewricht

- Ophanging poten achteraan



- Aan de ringen bevestigen op de rolstoel



Net boven de hak bevestigen op de poot





Huur hondenrolstoel

Toetsie in zijn huur hondenrolstoel:



Nog een filmpje: <https://www.pro4paws.com/huren-achterwiel-rolwagen>

Meer info: www.pro4paws.com