



## Aandoen heupbrace

---



### Aandoen harnas:

1. Ring op rug richting staart
2. Hoofd door opening
3. Sluiten clipsen op borst, tussen de banden en de hond zou een hand moeten kunnen zijn om vlot te kunnen ademen





## Aandoen heupbrace:

1. Bevestig de heupbrace aan de ring.



2. Sluit de sluitingen van de heupbrace rond de bovenbenen (vlak onder de liesstreek)



3. Indien nodig maak je bovenaan de heupbrace los en bevestig je de velcro op de juiste lengte.



Veel succes heb je nog vragen?

Via mail: [info@pro4paws.com](mailto:info@pro4paws.com)

Via GSM: 0494 177 668

Liesbet Diestelmans