

Beschermingslaars

Gebruik beschermingslaars

Deze beschermingslaarzen zijn bedoeld om bijvoorbeeld over een verband te gebruiken. Hierdoor blijft het verband droog en kan jouw hond toch naar buiten in nat weer. Deze beschermingslaarzen kunnen ook gebruikt worden bij een wonde aan de voetzool en/of tenen.

Materiaal beschermingslaars


Gemaakt uit waterbestendig en ademend materiaal. Het materiaal glijdt gemakkelijk over het verband.

Een verstelbare klittenbandsluitingen sluiten gemakkelijk aan op het smalste deel van de poot voor een veilige pasvorm. De sluiting met trekkoord aan de bovenkant houdt de laars op zijn plaats en voorkomt dat urine of regen via de bovenkant naar binnen sijpelt.



Maatname beschermingslaars

Om de juiste maat te weten, meet je de breedte van de poot. Je meet alles wat de grond raakt, dus als er een verband wordt gebruikt meet je de breedte van het verband dat op de grond komt.

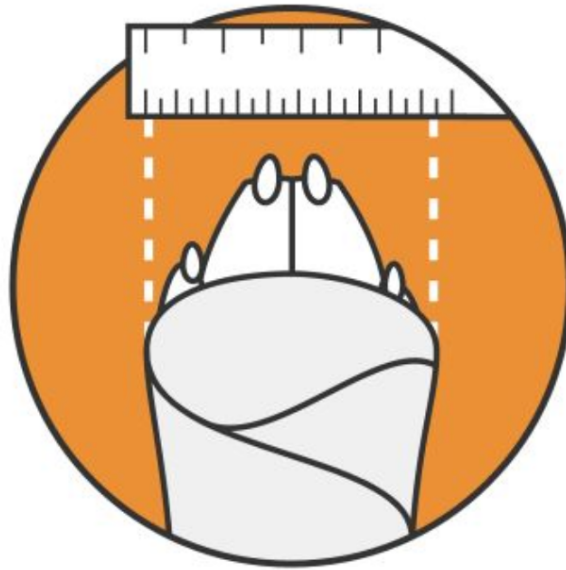

Maten van de beschermingslaars

De beschermingslaarzen kan je in 8 maten krijgen.

Verband breedte of pootbreedte	Laars hoogte	Maat beschermingslaars
4,5 cm	6,4 cm	XXX small
5,1 cm	15,2 cm	XX small
6,4 cm	21 cm	X small
7,6 cm	17,8 cm	small
7,6 cm	26,7 cm	small (lang model)
8,3 cm	33,1 cm	medium
9,5 cm	45,7 cm	large
11,4 cm	58,4 cm	x-large