



SOFT schouder/elleboog honden brace

Deze SOFT honden brace wordt gebruikt bij schouder en/of elleboogproblemen bij jouw hond. Door het elastisch materiaal wordt er extra steun gegeven aan de voorpoot. Hierdoor wordt het comfort tijdens steunen vergroot. Meestal wordt deze voor beide schouders en /of ellebogen gecombineerd. Maar je kan ook voor een model voor één voorpoot kiezen.

Gebruik elleboog honden brace

Deze SOFT schouder/elleboog honden brace wordt gebruikt bij artrose, reuma en/of lichte instabiliteit van de elleboog en/of schouder. Deze honden bracen kunnen tijdelijk worden ingezet tot er voldoende genezing is en het aangedane gewricht terug volledig kan worden belast. Maar deze bracen kunnen ook langere tijd gebruikt worden. Deze honden brace jouw hond meer comfort tijdens stappen, wandelen...

Materiaal elleboog honden brace

Bestaat uit elastische materialen neopreen. De sluitingen van deze honden brace bestaan uit klittenband.

Werking elleboog honden brace

Door de elasticiteit van het materiaal wordt er extra steun gegeven aan het elleboog gewricht.

Onderhoud soft brace

De soft honden bracen worden uit neopreen gemaakt, zijn elastisch afgeboord en kunnen al dan niet verstevigd worden. De sluitingen zijn gemaakt uit (elastische) klittenband.

Alle SOFT honden braces kunnen gewassen worden in een (wol) wasprogramma. Zorg er wel voor dat je de klittenband goed sluit. En doe alles in een waszakje.



Na gebruik buiten, best zand verwijderen dit kan door af te spoelen onder stromend water. Of de honden brace laten drogen en het droge zand verwijderen.

Bij twijfel of vragen mag je me steeds contacteren: 0494 17 76 68

Veel succes, Liesbet