



GEBRUIK POLS HONDEN BRACE

Een SOFT pols honden brace wordt gebruikt bij artrose, reuma en/of lichte instabiliteit van de pols.



Deze SOFT pols honden bracen kunnen tijdelijk worden ingezet tot er voldoende genezing is en het aangedane gewricht terug volledig kan worden belast.

Deze polsbrace geeft extra steun en geeft jouw (oudere) hond meer comfort tijdens stappen, wandelen...

MATERIAAL POLS HONDEN BRACE

Bestaat uit elastische materialen aan buitenkant zit neopreen. De binnenkant is extra gepolsterd. De sluitingen van deze honden brace bestaan uit klittenband.

WERKING POLS HONDEN BRACE

Door de elasticiteit van het materiaal wordt er extra steun gegeven aan het gewricht.

Deze honden brace kan ook extra verstevigd worden met (al dan niet op maat gemaakte) een balein toe te voegen.

ONDERHOUD SOFT BRACE

De soft honden bracen worden uit neopreen gemaakt, zijn elastisch afgeboord en kunnen al dan niet verstevigd worden. De sluitingen zijn gemaakt uit (elastische) klittenband.

Alle SOFT honden braces kunnen gewassen worden in een (wol) wasprogramma. Zorg er wel voor dat je de klittenband goed sluit. En doe alles in een waszakje.



Na gebruik buiten, best zand verwijderen dit kan door af te spoelen onder stromend water. Of de rug honden brace laten drogen en het droge zand verwijderen.

Bij twijfel of vragen mag je me steeds contacteren:
0494 17 76 68 of info@pro4paws.com

Veel succes, Liesbet