

# AANBEVOLEN DOOR DE AMERIKAANSE VERENIGING VAN UROLOGIE


Medische verenigingen adviseren om de ziekte van Peyronie te behandelen met behulp van collagenase en de penis te behandelen met een penistractieapparaat. Uit studies blijkt dat: "Penistractietherapie een efficiënte methode is om acute fase van de ziekte van Peyronie te behandelen met betrekking tot het verminderen van de peniskromming, pijnbestrijding en het verbeteren van de seksuele functie van de penis."



## WILT U DE ZIEKTE VAN PEYRONIE EFFECTIEF BEHANDELD HEBBEN?

# BEHANDELING VAN COLLAGENASE MET ANDROPEYRONIE

Andropeyronie® is een penistractieapparaat (PTD) dat enkele uren per dag zacht aan de penis trekt. De kracht die het apparaat overbrengt past bij de kromming. Het apparaat kan comfortabel en discreet gedragen worden. De collagenase van clostridium histolyticum (CCH) is een enzym dat in de penis wordt geïnjecteerd om de fibrose plaque te verminderen.

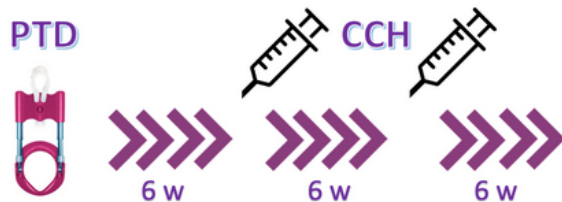

## 1. DIAGNOSE

Voor de behandeling van volwassen mannen met de ziekte van Peyronie met een voelbare plaque en een krommingsafwijking van ten minste 30 graden. Praat met uw arts over uw type kromming en of de behandeling geschikt voor u is.

## 2. INJECTIES

De medische behandeling bestaat uit cycli van 2 collagenase injecties en 6 weken omvormen door middel van het penistractie apparaat. Het aantal cycli bedraagt 2 tot 4, afhankelijk van de suggestie van de uroloog.

## 3. OMVORMING

Andropeyronie® wordt 6 uur per dag gebruikt, met om de 2 uur rust. Het apparaat is gemakkelijk te bevestigen op de penis en kan gedragen worden tijdens het lopen, zitten, enz.

# NU KUNT U DE PENISKROMMING VERMINDEREN MET BEHULP VAN DE GECOMBINEERDE METHODE VAN COLLAGENASE- INJECTIES MET ANDROPEYRONIE.

Vraag deze kliniek naar deze  
behandeling

andro  peyronie®

[www.andropeyronie.com](http://www.andropeyronie.com)

Andropeyronie® vermindert de kromming van de penis en herstelt de verloren lengte bij de ziekte van Peyronie en verbetert de seksuele werking. Het is een veilige en gemakkelijk te gebruiken methode.

Andropeyronie® is goedgekeurd en klinisch getest. Het apparaat gebruikt een band voor meer comfort en een technologie om alle soorten krommingen te behandelen. Het is een gepatenteerd apparaat met reeds 1 miljoen tevreden gebruikers.



**GECOMBINEERDE BEHANDELING  
MET EEN CORRECTIE VAN MEER  
DAN 80%**