

# FFP2

## Mascarilla filtrante

> 98% filtración de aerosoles de partículas



### Información técnica

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2 - NR (No reutilizable)

Modelo: MSH

PFE > 94 % (>98% para aerosoles de NaCl)

Tamaño: 15,7 x 10,7 cm

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009

Composición: 66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida por soplado

Aviso de alergia: Textil no tejido

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

### Especificaciones

Diseño que se ajusta a la cara perfectamente

Alta respirabilidad

Doble welding que garantiza la resistencia de los cordones hasta 25 newtons

Con regulador de tamaño


Con salvaorejas incluido

Embalado en bolsa individual:

- Con cierre zip para guardar la mascarilla mientras no se usa
- Con identificador de horas de uso
- Con identificador del propietario
- Sistema de ventilación

### Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Coloque los reguladores de tamaño en las cintas de la mascarilla tal y como muestra la imagen.
2. Sujete la mascarilla con una mano y colóquela sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Tire de las cintas y colóquelas detrás de las orejas. Regule el tamaño de las gomas con los reguladores para un mejor ajuste. Ajuste el clip nasal a la nariz y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
4. Haga una prueba de ajuste-fuga: cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas de aire por los bordes, modifique la posición de la mascarilla, el ajuste del clip nasal o las cintas a través de los reguladores. Repita este proceso hasta que no se produzca ninguna fuga.

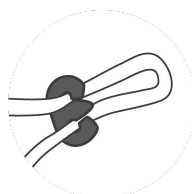

CE 2163

EN 149:2001 + A1:2009

Mascarilla FFP2  
Ajuste en oreja



# FFP2

## Mascarilla filtrante

> 98% filtración de aerosoles de partículas



### Información importante

- Los equipos NR no deben usarse en más de 8 horas.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejadas de fuentes de calor.
- Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos.

### Características de la bolsa individual

Cantidad: 1 ud/bolsa  
Dimensión: 130 x 205 mm  
Peso: 12 g

SKU: MASK-ST-00029.0001



SKU: MASK-ST-00013.0001



### Características de la caja

Cantidad: 60 paquetes/caja  
Total cantidad: 600 unidades  
Dimensión: 485 x 415 x 444 mm  
Peso: 10,2 kg


### Características del paquete 10 uds

Cantidad: 10 uds(bolsas individuales)/paquete  
Dimensión: 131 x 210 x 45 mm  
Peso: 153 g

SKU: MASK-ST-00029.0010



SKU: MASK-ST-00009.0010

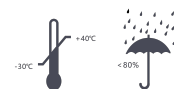

CE 2163

EN 149:2001 + A1:2009