

Mascarilla FFP2  
Apta para uso infantil



# FFP2

## Mascarilla de filtración

### Apta para uso infantil (6 a 12 años)



#### Información técnica

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2 - NR (No reutilizable)

Modelo: STC-F2-01

Tamaño: 138 mm x 97 mm

Apta para uso infantil (edad recomendada): 6 - 12 años

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009

Composición: 66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida por soplado

Aviso de alergia: Textil no tejido

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

#### Especificaciones

**Ajuste en nuca para mayor comodidad**

**Diseño que se ajusta a la cara perfectamente**

**Alta respirabilidad**

**Doble welding** que garantiza la resistencia de los cordones hasta 25 newtons


Con **regulador de tamaño**

**Embalado en bolsa individual:**

- Con cierre zip para guardar la mascarilla mientras no se usa
- Con identificador de horas de uso
- Con identificador del propietario
- Sistema de ventilación

#### Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Sujete la mascarilla con una mano, posicionándola en la cara de forma que cubra la nariz y la barbilla.
2. Coloque la cinta superior por detrás de la cabeza.
3. A continuación, pase la cinta inferior por detrás de la cabeza hasta colocarla a la altura de la nuca. Ajuste el regulador para una sujeción óptima.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.

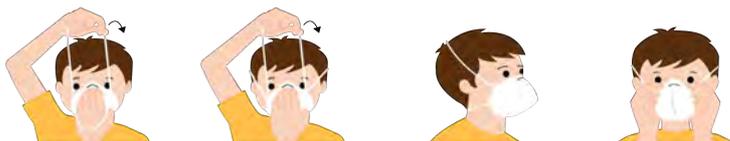

CE 0370

EN 149:2001 + A1:2009

Mascarilla FFP2  
Apta para uso infantil



# FFP2

## Mascarilla de filtración

### Apta para uso infantil (6 a 12 años)



#### Información importante

- Los equipos NR no deben usarse más de 8 horas.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejadas de fuentes de calor.
- Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos.

#### Características de la bolsa individual

Cantidad: 1 ud/bolsa  
Dimensión: 130 x 205 mm  
Peso: 12 g

SKU: MASK-ST-00031.0001



#### Características paquete 10 uds

Cantidad: 10 uds(bolsas individuales)/caja  
Dimensión: 131 x 210 x 45 mm  
Peso: 153 g

SKU: MASK-ST-00031.0010



#### Características de la caja

Cantidad: 60 paquetes/caja  
Total cantidad: 600 unidades  
Dimensión: 485 x 415 x 444 mm  
Peso: 10,2 Kg

CE 0370

EN 149:2001 + A1:2009