



## Mascarilla de filtración FFP2 - NR / Agarre en oreja

> 98% filtración de aerosoles de partículas

### Información técnica

**Nombre de producto:** Mascarilla de filtración

**Clasificación:** FFP2 - NR (No reutilizable)

**Modelo:** MSH

**Tamaño:** 157 mm x 107 mm

**Estándar:** EN 149:2001 + A1:2009

**Composición:** 66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida por soplado

**Aviso de alergia:** Textil no tejido

**Caducidad:** Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

### Especificaciones

**Diseño que se ajusta** a la cara perfectamente

**Alta respirabilidad**

**Doble welding** que garantiza la resistencia de los cordones hasta 25 newtons

**Con reguladores de tamaño**

**Con salvaorejas incluido**

**Embalado en bolsa individual**

### Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.





# Mascarilla de filtración FFP2 - NR / Agarre en oreja

> 98% filtración de aerosoles de partículas

## Información importante

- Los equipos NR no deben usarse en más de 8 horas.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejadas de fuentes de calor.
- Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos.

### Características de la bolsa individual

**Cantidad:** 1 ud/bolsa  
**Dimensión:** 137 x 113 mm  
**Peso:** 6 g

SKU: MASK-GC-00001.0001



### Características de la caja 10 uds

**Cantidad:** 10 uds/caja  
**Dimensión:** 182 x 117 x 56 mm  
**Peso:** 132 g

SKU: MASK-GC-00001.0010



### Características de la caja 50 uds

**Cantidad:** 50 uds/caja  
**Dimensión:** 280 x 182 x 117 mm  
**Peso:** g

SKU: MASK-GC-00001.0050



### Características de la master carton (10 uds)

**Cantidad:** 60 paquetes/caja  
**Total cantidad:** 600 unidades  
**Dimensión:** 485 x 415 x 444 mm  
**Peso:** 10,2 kg



### Características de la master carton (50 uds)

**Cantidad:** 60 paquetes/caja  
**Total cantidad:** 600 unidades  
**Dimensión:** 568\*305\*490 mm  
**Peso:** 8,5 kg

