

FFP2 GoCare Colores

Fabricada en España



Información técnica

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2 NR

Modelo: GC-F2-012

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009

Composición: 48% Non-woven, 35% Melt-blown, 17% Algodón, clip metálico nasal y cintas elásticas.

Aviso de alergia: Textil no tejido

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

Especificaciones

Diseño que se ajusta a la cara perfectamente

Alta respirabilidad

Embalado en bolsa individual

Incluye 2 salvaorejas por caja para ajuste en nuca alternativo

Fabricado y distribuido por:

Star TIC Innovación, S.A. CIF: A-84676519

C/ Estrasburgo, 8, 28232, Las Rozas de Madrid, España

Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Coloque la mascarilla sobre la cara en la posición correcta cubriendo nariz y boca.
 2. Coloque las cintas de sujeción tras las orejas.
 3. Presione el clip nasal para adaptarlo a la nariz. Asegúrese de que los extremos de la mascarilla están en contacto directo con la cara para garantizar un buen sellado.
 4. Para comprobar que el ajuste es correcto, coloque ambas manos sobre la mascarilla y exhale con fuerza. Si el aire se filtra por el borde, reajuste el clip nasal hasta obtener un sellado apropiado. Si observa fugas por los laterales, recolocque las cintas para un mejor ajuste.
 5. Repita los pasos de ajuste hasta que la mascarilla esté correctamente sellada. Contiene dos salvaorejas de uso opcional para conseguir un ajuste en nuca alternativo.
- Si no consigue un ajuste apropiado, no se exponga a un ambiente contaminado, ya que existe riesgo para su salud.




Mascarilla FFP2 NR
Ajuste en oreja



FFP2 GoCare Colores

Fabricada en España

Imágenes mascarilla

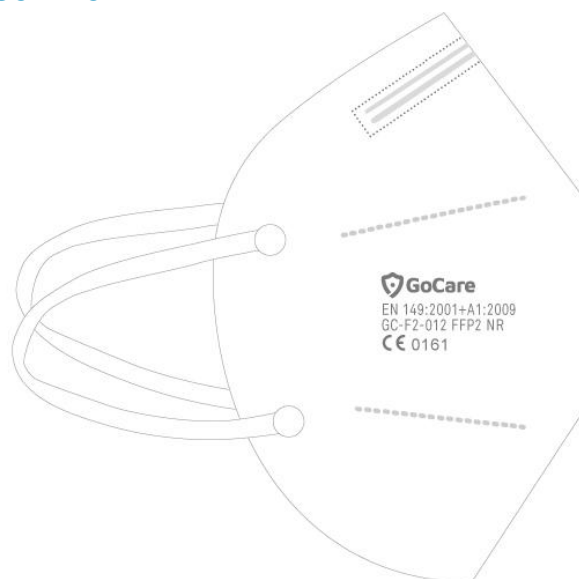

CE0161

FFP2 GoCare Colores

Fabricada en España

Imágenes mascarilla


Capa 1: Non-woven 50 g/m²

Capa 2: Melt-blown 25 g/m²

Capa 3: Hot Air cotton 50 g/m²

Capa 4: Melt-blown 25 g/m²

Capa 5: Non-woven 30 g/m²

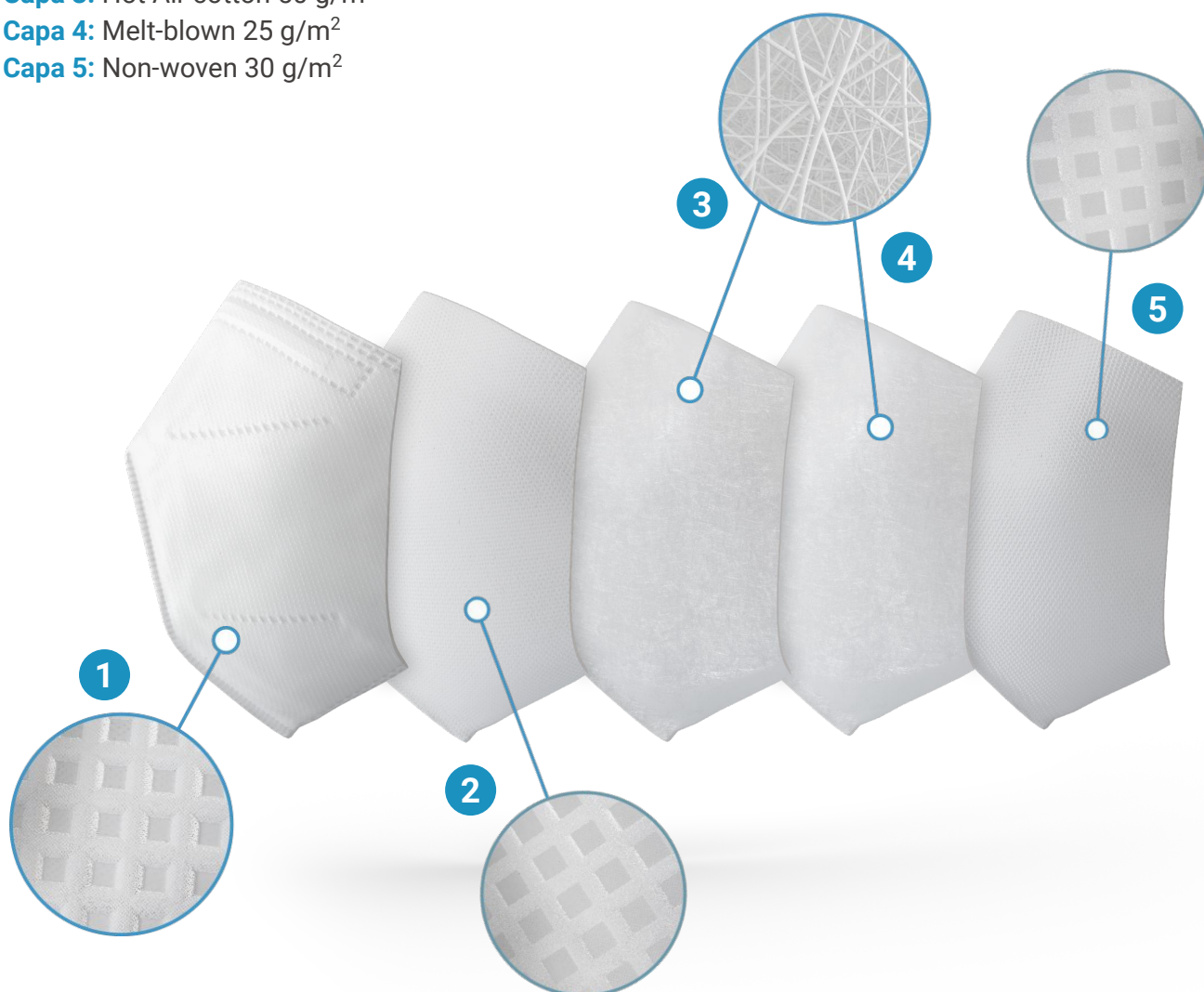

Mascarilla FFP2 NR
Ajuste en oreja



FFP2 GoCare Colores

Fabricada en España

Imágenes mascarilla



CE0161

FFP2 GoCare Colores

Fabricada en España

Embalaje

Características de la bolsa individual

Cantidad: 1 ud/bolsa
Dimensión: 180 x 120 mm
Peso: 10 g



Características de la caja 10 uds

Cantidad: 10 uds
Dimensión: 170 x 130 x 49,5 mm
Peso: 120 g



Características de la Master carton

Cantidad: 36 cajas/master carton
Total cantidad: 360 unidades
Dimensión: 400 x 360 x 324 mm
Peso: 4,9 kg aprox.



FFP2 GoCare Colores

Fabricada en España

Colores

 Azul claro

MASK-GC-00011.0010



 Rosa claro

MASK-GC-00013.0010



 Fucsia

MASK-GC-00014.0010



 Gris claro

MASK-GC-00015.0010



 Naranja

MASK-GC-00016.0010



 Rojo

MASK-GC-00018.0010



 Camel


MASK-GC-00021.0010



 Lila

MASK-GC-00022.0010



 Verde fluorescente

MASK-GC-00028.0010



 Retro

MASK-GC-00029.0010



FFP2 GoCare Colores

Fabricada en España

Bolsa individual

Limitaciones de uso. Asegúrese de NO usar la mascarilla en estas condiciones: En una atmósfera con un nivel de oxígeno inferior al 19,5%; Si pretende protección contra gases o vapores; Si los contaminantes o sus concentraciones son desconocidos o inmediatamente peligrosos para la vida o la salud; En operaciones de arenado, pintura en spray o tratamientos con asbestos; En atmósferas explosivas. • No utilice la mascarilla contra gases. • El usuario debe ser conocedor del uso y manejo de la mascarilla antes de usarla. • No utilice en zonas de riesgo de explosión. • Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos. • No debe usarse más de un turno de trabajo cuando está marcada como "NR", por lo que debe desecharse después de su utilización.

Si no consigue un ajuste apropiado, no se exponga a un ambiente contaminado, ya que existe riesgo para su salud. Este producto ha sido fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425 para su uso básico. Este producto está diseñado para proteger contra aerosoles sólidos y líquidos de la atmósfera ambiental, ha pasado EN149: 2001 + A1: 2009 en conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425. Siga las instrucciones de uso y tenga en cuenta estas advertencias. En caso contrario, la efectividad de la mascarilla durante su exposición se verá reducida, lo que puede provocar un riesgo serio para su salud. El usuario debe asegurarse de que sabe como usar y colocarse la mascarilla previamente. Asegúrese de que la mascarilla se encuentra en perfectas condiciones antes de usarla: que no esté sucia, dañada ni con alguna cinta suelta.

Fecha de producción- Production Date - Final de vida útil: 2 años. End of Shelf Life: 2 years. N° de lote - Batch

Recomendaciones de uso/ Advertencias: Compruebe si el envase está en buenas condiciones. Si está dañado, no use la mascarilla. Debe usar la mascarilla lo antes posible después de la apertura del envase. No debe ser usada más de un turno de trabajo. No lavable. • Por favor, usar dentro de la validez. Caducidad: 2 años. • Verificar antes de usar su forma correcta de utilización y ajuste. • La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir que se cumplan los requisitos de estanqueidad de la mascarilla. • Tenga en cuenta la calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno). No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas. • No usar la mascarilla en atmósferas explosivas. • Esta mascarilla no requiere de ningún tipo de mantenimiento al tratarse de un EPI de un solo uso (no reutilizable).

Embalaje: La unidad mínima de comercialización de esta mascarilla es individual, pudiendo ser comercializada en cajas de 10 unidades. El transporte del producto en cajas de 360 unidades se realizará en cajas de cartón para mejor conservación durante el trayecto. Lote: /Fecha de producción: Ver envase / Final de vida útil: 2 años. Incluye salvaorejas de uso opcional.

Almacenamiento: No retire la mascarilla de la bolsa hasta su uso. Desechar tras su utilización. Manténgala alejada de agentes agresivos.

Composición: Nonwoven (48%), Meltblown (35%), algodón (17%), clip metálico nasal, cintas elásticas.

Organismo notificado: Aitex, Pza. Emilio Sala, 1, 03801, Alcoy, Alicante, España.

Información del fabricante: Rendimiento registrado durante las pruebas técnicas pertinentes para comprobar los niveles o clases de protección proporcionados por el EPI según el Reglamento (UE) 2015/425. Máxima penetración del material filtrante (Aerosol parafina y Cloruro sódico): 6%. Eficacia de filtración >94% - NR - No Reutilizable.

Fabricado y distribuido por:
Star TIC Innovación, S.A. CIF: A-84676519
C/ Estresburgo, 8, 28232, Las Rozas de Madrid, España
www.starcare.es


1 UD



Mascarilla de filtración FFP2 NR

CE 0161

Información técnica


Nombre: Mascarilla de filtración
Clasificación: FFP2 NR
Modelo: GC-F2-012
Estándar: EN 149: 2001 + A1: 2009
Composición: Nonwoven (48%), Meltblown (35%), algodón (17%), clip metálico nasal, cintas elásticas.
Aviso de alergia: Textil no tejido
Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas.
Fecha de producción y nº de lote: Ver envase



Caducidad
2 años



Ver información proporcionada por el fabricante



No reutilizable





Rango de temperatura de almacenamiento
-10°C - 10°C




Máxima humedad relativa de almacenamiento
80%

Declaración de Conformidad







8 436502 201015

5. Repita los pasos de ajuste hasta que la mascarilla esté correctamente sellada.

4. Para comprobar que el ajuste es correcto, coloque ambas manos sobre la mascarilla y exhale con fuerza. Si el aire se filtra por el borde, reajuste el clip nasal hasta obtener un sellado apropiado. Si observa fugas por los laterales, recolocando las cintas para un mejor ajuste.

3. Presione el clip nasal para adaptarlo a la nariz. Asegúrese de que los extremos de la mascarilla están en contacto directo con la cara para garantizar un buen sellado.

2. Coloque las cintas de sujeción tras las orejas.

1. Coloque la mascarilla sobre la cara en la posición correcta cubriendo nariz y boca.

Instrucciones de colocación

Consulte la información proporcionada por el fabricante






CE0161

FFP2 GoCare Colores

Fabricada en España

Caja 10 Uds



CE0161

FFP2 GoCare Colores

Fabricada en España

Master carton



FFP2 GoCare Colores

Fabricada en España

Información importante

- **Recomendaciones de uso/ Advertencias:** Compruebe si el envase está en buenas condiciones. Si está dañado, no use la mascarilla. Debe usar la mascarilla lo antes posible después de la apertura del envase. No debe ser usada más de un turno de trabajo. No lavable. • Por favor, usar dentro de la validez. • Verificar antes de usar su forma correcta de utilización y ajuste. • La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir que se cumplan los requisitos de estanqueidad de la mascarilla. • Tenga en cuenta la calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno). No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas. • No usar la mascarilla en atmósferas explosivas. • Esta mascarilla no requiere de ningún tipo de mantenimiento al tratarse de un EPI de un solo uso (no reutilizable). Este producto ha sido fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425 para su uso básico. Este producto está diseñado para proteger contra aerosoles sólidos y líquidos de la atmósfera ambiental, ha pasado EN149: 2001 + A1: 2009 en conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425. Siga las instrucciones de uso y tenga en cuenta estas advertencias. En caso contrario, la efectividad de la mascarilla durante su exposición se verá reducida, lo que puede provocar un riesgo serio para su salud. El usuario debe asegurarse de que sabe cómo usar y colocarse la mascarilla previamente. Asegúrese de que la mascarilla se encuentra en perfectas condiciones antes de usarla: que no esté sucia, dañada ni con alguna cinta suelta.
- **Almacenamiento:** No retire la mascarilla de la bolsa hasta su uso. Desechar tras su utilización. Manténgala alejada de agentes agresivos.
- **Limitaciones de uso.** Asegúrese de NO usar la mascarilla en estas condiciones: En una atmósfera con un nivel de oxígeno inferior al 19.5%; Si pretende protección contra gases o vapores; Si los contaminantes o sus concentraciones son desconocidos o inmediatamente peligrosos para la vida o la salud; En operaciones de arenado, pintura en spray o tratamientos con asbestos; En atmósferas explosivas. • No utilice la mascarilla contra gases. • El usuario debe ser conocedor del uso y manejo de la mascarilla antes de usarla. • No utilice en zonas de riesgo de explosión. • Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos. • No debe usarse más de un turno de trabajo cuando está marcada como "NR", por lo que debe desecharse después de su utilización.
- **Organismo notificado:** Aitex, Pza. Emilio Sala, 1, 03801, Alcoy, Alicante, España.
- **Información del fabricante:** Rendimiento registrado durante las pruebas técnicas pertinentes para comprobar los niveles o clases de protección proporcionados por el EPI según el Reglamento (UE) 2016/425. Máxima penetración del material filtrante (Aerosol parafina y Cloruro sódico): 6%. Eficacia de filtración >94% - NR - No Reutilizable.
- **Embalaje:** La unidad mínima de comercialización de esta mascarilla es individual, pudiendo ser comercializada en cajas de 10 unidades. El transporte del producto en cajas de 360 unidades se realizará en cajas de cartón para mejor conservación durante el trayecto.



CE0161